
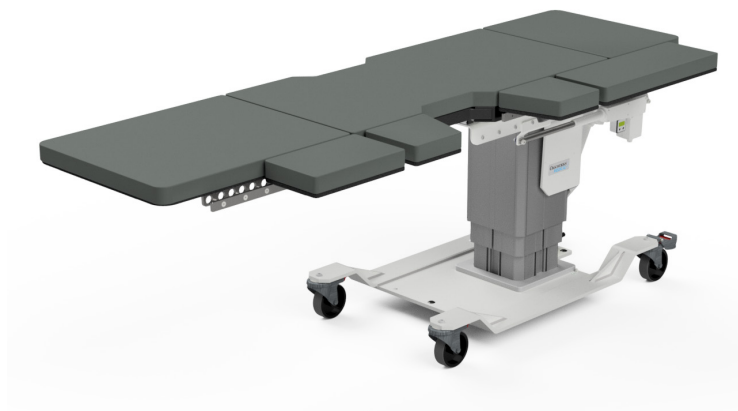
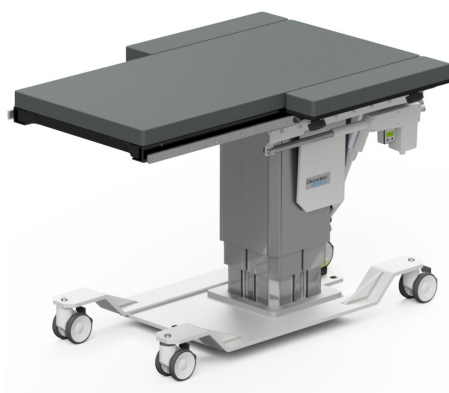


# MANUALE UTENTE

---

## OAKWORKS®

### Lettini per imaging e gestione del dolore

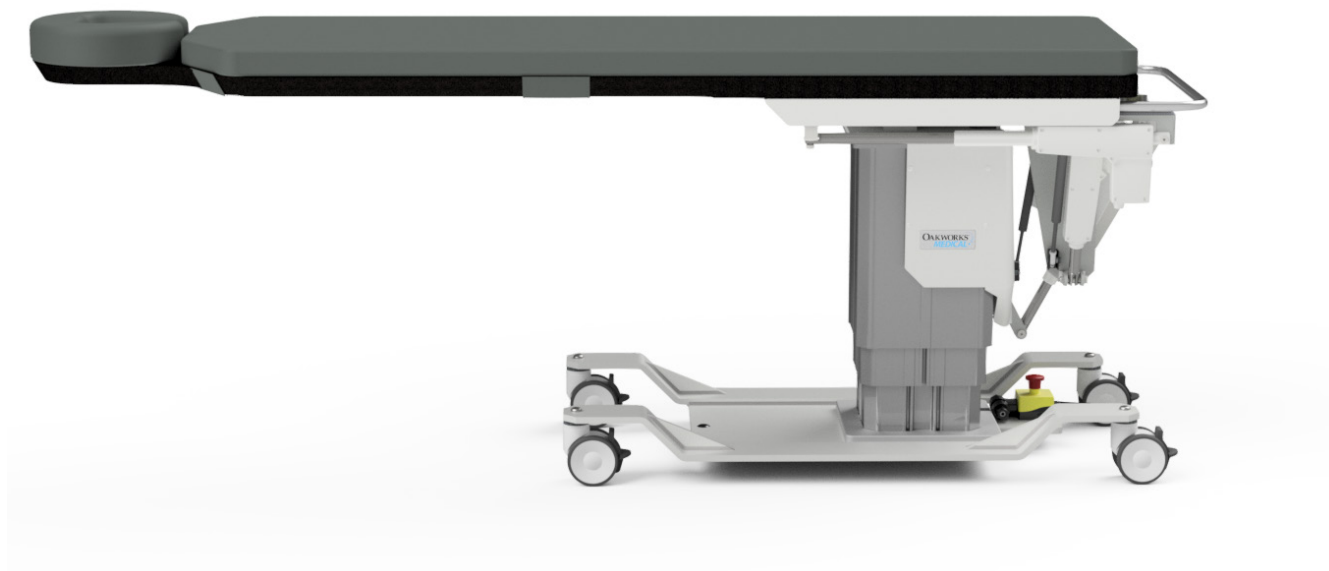

[www.oakworksmed.com](http://www.oakworksmed.com) · +1 717.235.6807



**OAKWORKS®**  
MEDICAL PRODUCTS

Stampato negli U.S.A.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta né tradotta in un'altra lingua senza previo consenso scritto di OAKWORKS®, Inc.

OAKWORKS® è un marchio depositato di OAKWORKS®, Inc.

#### Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere intese come impegno da parte di OAKWORKS®, Inc.

OAKWORKS®, Inc. incoraggia le richieste di specifiche tecniche e documentazioni simili per assicurare l'accuratezza. La documentazione appropriata è disponibile su richiesta.

OAKWORKS®, Inc. declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali collegati a arredo, prestazioni, o uso di questo documento o derivanti da essi e collegati al materiale del programma che esso descrive o derivanti da esso.

# INDICE

---

Descrizione dell'uso del prodotto.....	1
Istruzioni importanti per la sicurezza	
Spiegazione dei simboli.....	1
Controindicazioni .....	1
Istruzioni per la sicurezza .....	2-3
Descrizione e foto del prodotto	
CFPM100.....	4
CFPM200.....	5-6
CFPM300.....	7-8
CFPM400.....	9-10
CFPM201.....	11-12
CFPM301.....	13-14
CFPM302.....	15-16
CFPMB301 - Bariatrico .....	17-18
CFPM401.....	19-20
CFLU401 - Litotripsia.....	21-22
CFUR301 - Urologia.....	23-24
CFUR401 - Urologia.....	25-26
Installazione	
Collegamento a terra .....	27
Istruzioni per l'uso	
Livella a bolla .....	28
Indicatore di angolazione .....	28
Cinghia di sicurezza per pazienti.....	28
Rimozione / ricollocazione del cuscinetto del lettino .....	29
Regolazione del Cuscinetto Poggia-Viso a Mezzaluna (unicamente top con poggiatesta integrati) .....	29
Uso delle rotelle direzionabili.....	30
Arresto di emergenza .....	30
Portata e utilizzo per il paziente .....	31
Anello sacca del lettino per urologia.....	31
Estensioni laterali per lettino per litotripsia/urologia e urologia .....	32
Estensioni per estremità per lettino per litotripsia/urologia e urologia .....	33
Lettino per litotripsia usato per urologia.....	33
Poggiabracchio in fibra di carbonio.....	34
Morsetto della guida a T regolabile.....	34
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II .....	35
Estensore fluoro .....	35
Riferimento – Diagrammi area utilizzabile per l'imaging	
CFPM100 – Poggiatesta integrati e top rettangolari.....	36-37
CFPM200 Attraverso CFPM401 – Top poggiatesta integrato .....	38
CFPM200 Attraverso CFPM401 – Top rettangolare.....	39
CFUR301 e CFUR401 – Top per urologia.....	40
CFLU401 – Top per litotripsia/urologia.....	41
Pulizia e disinfezione / Ispezioni / Garanzia	
Disinfettanti / agenti per la pulizia raccomandati.....	42
Procedura per la pulizia.....	43
Ispezioni e manutenzione .....	43
Informazioni di garanzia .....	43
Informazioni identificatore unico del dispositivo (UDI) .....	44
Specifiche	
Specifiche del prodotto .....	45
Condizioni ambientali .....	45
Specifiche elettriche .....	45
Guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche.....	46
Distanze di separazione raccomandate .....	46
Zona Di Esposizione.....	47-50
Guida e dichiarazione del fabbricante - Smaltimento del prodotto .....	50
Informazioni di contatto .....	Copertina posteriore

---

# DESCRIZIONE DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO/IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

## DESCRIZIONE DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO

I lettini per imaging e gestione del dolore OAKWORKS® sono lettini radiografici destinati ad essere utilizzati con sistemi di imaging con braccio a C mobili o fissi compatti. Idealmente, sono indicati per imaging nella terapia del dolore e per procedure terapeutiche. Questi lettini sono idonei per essere utilizzati per imaging diagnostico a raggi X e imaging nel corso di procedure terapeutiche come iniezioni spinali, procedure di vertebroplastica e altre procedure di terapia del dolore. I lettini CFLU e CFUR sono destinati a procedure di litotripsia e urologia. Devono essere utilizzati da professionisti del settore sanitario in ambiente medico. Non è richiesta alcuna formazione specifica, ma l'esame delle istruzioni di sicurezza che seguono è importante per la sicurezza di operatore e paziente. Il professionista deve leggere e comprendere tutto il manuale prima dell'uso su un paziente.

NOTA Le caratteristiche delle EMISSIONI di questo dispositivo lo rendono idoneo all'uso in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se viene usato in un ambiente residenziale (per cui di solito è richiesta la specifica CISPR 11 classe B), questo dispositivo potrebbe non offrire protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza. L'utente potrebbe dover prendere misure di mitigazione, come ricollocazione o nuovo orientamento del dispositivo.

## SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, rappresenta un'avvertenza. Assicurarsi di leggere tutte le precauzioni e le avvertenze e di attenersi ad esse.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, avverte del pericolo di scossa elettrica. Assicurarsi di osservare le avvertenze e di attenersi ad esse.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica la possibilità di esposizione a raggi X dannosi. Assicurarsi di leggere le avvertenze e di attenersi ad esse.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica che il lettino e i componenti sono parti applicate di tipo B ai sensi di IEC 60601-1.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica un morsetto di messa a terra di protezione.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica nome e indirizzo del fabbricante.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica il Paese e la data di fabbricazione del dispositivo.



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica corrente alternata (CA).



Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica corrente continua (CC).



Questo simbolo è utilizzato per indicare che l'operatore deve consultare il manuale.



È proibito sedersi in quest'area.

## CONTROINDICAZIONI

I lettini per imaging e gestione del dolore Oakworks non devono essere utilizzati con sistemi di imaging che hanno schermi intensificatori o cassette della pellicola superiori a 12 pollici (30 cm) quando si utilizza un campo di visualizzazione obliquo. I lettini non sono destinati a procedure di imaging a risonanza magnetica e non devono essere utilizzati a tale scopo.

# ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

---

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



### **ATTENZIONE**

### **LEGGERE E SALVARE QUESTE ISTRUZIONI**

Dopo aver tolto il lettino dall'imballaggio, ispezionarlo bene per rilevare eventuali segni di danni. Se si sospetta un problema, non utilizzare il lettino e rivolgersi al servizio clienti al numero 800-916-4612.

L'uso non corretto di questo dispositivo può provocare lesioni. Prima dell'uso assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni operative.

Limite di peso (paziente e accessori): 227 kg / 500 lb distribuiti in modo uniforme. (Solo lettino bariatrico: 340 kg / 750 lb).

Non sedersi oltre la linea di avvertenza sul top del lettino in fibra di carbonio. Su top per litotripsia / urologia - Non sedersi su nessuna estensione (limite di peso: 200 lb / 91 kg).

Il lettino utilizza quattro rotelle direzionabili che consentono lo spostamento del lettino con il gruppo per imaging. È

Possibile un movimento accidentale del lettino. Bloccare le ruote prima di eseguire l'imaging del paziente. Bloccare le ruote quando il paziente sale o scende dal lettino.

Il lettino non deve essere utilizzato in prossimità di o impilato con altre apparecchiature e nel caso sia necessario l'utilizzo in prossimità o impilato, bisogna verificare il normale funzionamento del lettino nella configurazione in cui sarà utilizzato.

L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati (con l'eccezione di trasduttori e cavi venduti dal fabbricante di questo dispositivo come parti di ricambio dei componenti interni) può avere come risultato un aumento delle emissioni o una minore immunità del lettino.

Il lettino è stato progettato come unità autonoma usata con le apparecchiature radiografiche. Questo lettino non deve essere modificato né incorporato in alcun'altra apparecchiatura.

Potrebbero esserci punti di rischio sotto il top del lettino. Non consentire ad alcuna parte del corpo di restare sotto il top quando il lettino è in movimento.

Accertarsi che il lettino sia completamente abbassato prima di far scendere un paziente in ambulatorio. Il paziente potrebbe perdere l'equilibrio e cadere.

Il paziente deve essere fissato con una cinghia di sicurezza prima di utilizzare i lettini.

I dispositivi elettromedicali hanno bisogno di speciali precauzioni per quanto riguarda l'EMC e devono essere installati e messi in funzione secondo le istruzioni EMC fornite nelle specifiche presenti alla fine di questo manuale.

Gli apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili possono influenzare i dispositivi elettromedicali.

Questo lettino non è adatto ad essere utilizzato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o ossigeno o ossido di azoto.

Rischio di shock elettrico. Il modulo di alimentazione/comando si trova all'interno della colonna di sollevamento e sotto il top. L'utente non può intervenire su alcuna parte interna. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. Scollegare il connettore a parete prima di toccare qualsiasi cavo collegato all'alimentazione.

Per evitare il rischio di shock elettrico, questa apparecchiatura deve essere collegata a una presa che sia correttamente messa a terra. Vedere le istruzioni per il COLLEGAMENTO A TERRA di questo manuale.

L'affidabilità del collegamento a terra si ottiene solo quando questa apparecchiatura è collegata a una presa a 3 poli equivalente contrassegnata da "Solo uso ospedaliero" o "Tipo ospedaliero".

I lettini medici Oakworks sono concepiti e fabbricati per assicurare molti anni di servizio affidabile. Nello smaltire i componenti elettrici utilizzati nel lettino, seguire le normative e le leggi locali.

Non applicare una forza eccessiva al comando manuale / del piede poiché potrebbe danneggiare il controllo.

Non utilizzare il comando manuale / a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

Il tavolo non è concepito per essere usato per la RCP (rianimazione cardiopolmonare).

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

---

### **ATTENZIONE**

L'uso previsto per il poggiaviso rettangolare e integrato di livello superiore non richiede tende. L'uso di tende sterili è raccomandato per i prodotti di lito/urologia per determinate procedure e quando è richiesto l'utilizzo dell'anello per urostomia.

Funzionamenti anomali del tavolo saranno visibili dall'operatore, ad esempio due funzioni/due movimenti in azione allo stesso momento. Questo indica che il tavolo non funziona correttamente a causa di un errore (corto/aperto) nei componenti di comando.

Gli accessori Oakworks devono essere usati solo con i prodotti Oakworks. L'uso di accessori non Oakworks, come braccioli e cuscini, potrebbe esporre il paziente a una esposizione eccessiva alle radiazioni.

### **AVVERTENZA**

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, shock elettrico o lesioni personali:

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di pulirlo.
2. Scollegare dalla presa elettrica prima di aggiungere o rimuovere componenti.
3. Non utilizzare mai questo dispositivo se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o se è danneggiato o è stato immerso in acqua. Prima dell'uso, contattare il servizio clienti Oakworks.
4. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
5. Non far cadere né inserire mai alcun oggetto nelle aperture.
6. Non usare all'esterno.
7. Non utilizzare in luoghi in cui vengono usati prodotti vaporizzati (spray) o dove viene somministrato ossigeno.

### **PERICOLO**

Quando questo lettino è in uso, esiste la possibilità di esposizione a raggi X pericolosi. È necessario l'uso di adeguati dispositivi barriera per raggi X per garantire la protezione sia di operatore che di paziente. Si raccomandano dispositivi barriera per raggi X al di fuori dell'area target di destinazione per prevenire l'esposizione a radiazione sparsa dalla fonte che genera i raggi X.

Il top del lettino ha una normale equivalenza di filtraggio dell'alluminio di 1,10 mm misurata a 100 kVp e un semi valore (HVL) di 3,6 mm. (NOTA: Il top del lettino ha una normale equivalenza di filtraggio dell'alluminio di 1,50 mm, misurata a 100 kVp, e un semi valore (HVL) di 3,6 mm.

- I lettini per imaging e gestione del dolore Oakworks possono essere usati per imaging a raggi se il generatore di raggi X si trova al di sotto del top del lettino e il recettore dell'immagine si trova al di sopra del top del lettino. Questo è il metodo raccomandato. I lettini possono anche essere utilizzati per imaging a raggi X laddove il generatore di raggi X si trovi al di sopra del top del lettino e il recettore dell'immagine si trovi al di sotto del top del lettino. Questa applicazione avrà come risultato una maggiore esposizione del paziente ai raggi X. L'operatore deve soppesare questo problema rispetto ai requisiti dell'imaging e ai problemi di esposizione del paziente.
- I lettini per imaging e gestione del dolore possono essere utilizzati con il generatore di raggi X al di sopra del top del lettino e una cassetta della pellicola sul top del lettino. (Vedere le controindicazioni riguardanti le dimensioni della cassetta della pellicola).
- Il generatore a raggi X non deve mai trovarsi al di sopra del top del lettino se il lettino per imaging e gestione del dolore Oakworks e il sistema di posizionamento della spina dorsale/Prone Pillow Oakworks vengono usati insieme. Questo tipo di uso richiede che il generatore a raggi X si trovi al di sotto del top del lettino e l'intensificatore di imaging o la cassetta della pellicola al di sopra dello stesso.
- Non usare i comandi all'interno della ZONA DI ESPOSIZIONE.


### **AVVERTENZA**

Questo dispositivo medico non è sicuro per la risonanza magnetica e deve rimanere al di fuori della sala dello scanner MRI.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM100

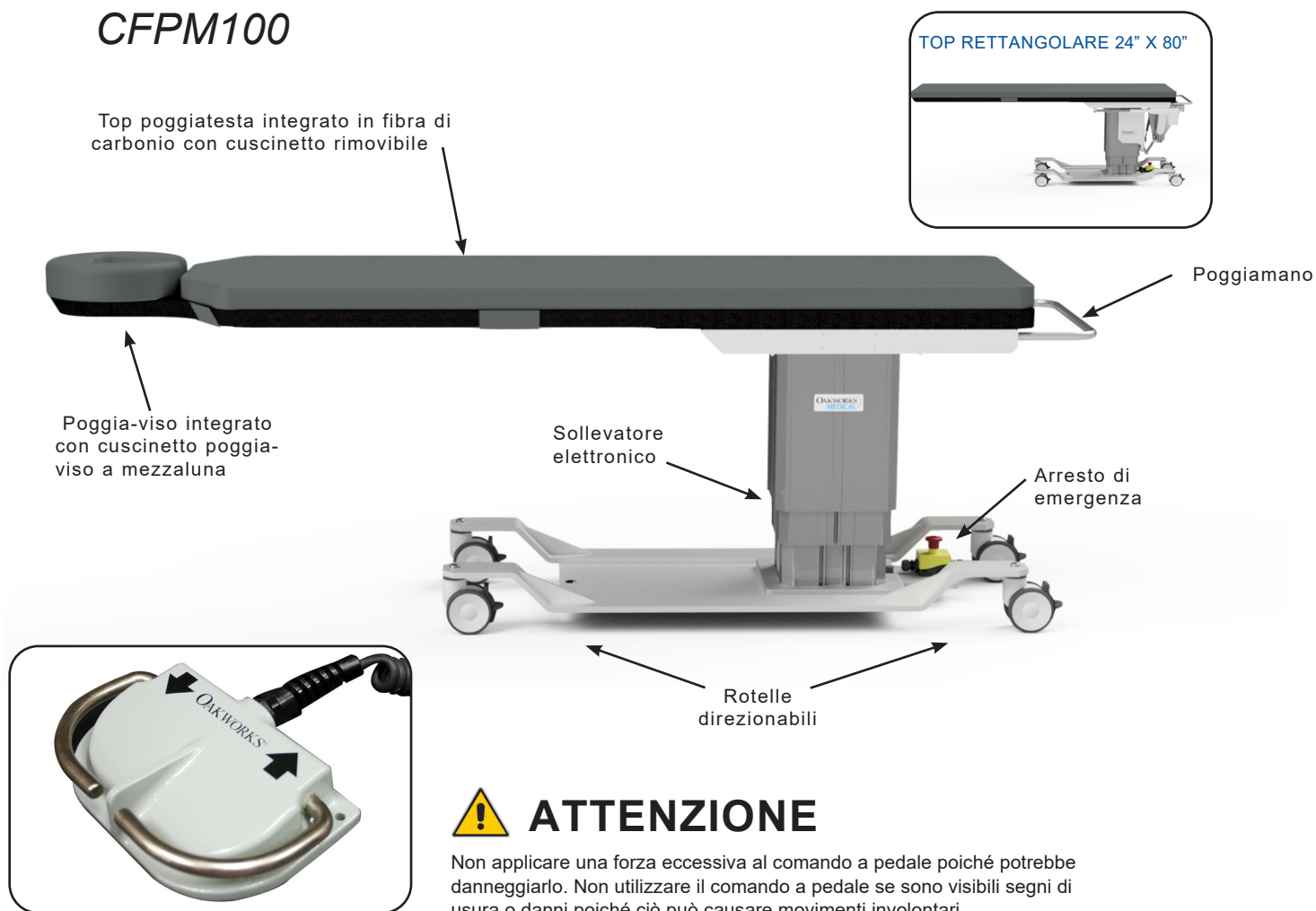

### **ATTENZIONE**

Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

CFPM 100 Comando a pedale

SPECIFICHE STANDARD	
Movimento in altezza	Alimentato 22"-40" (56-102 cm)
Comando a pedale	Movimento verso l'alto
Scelta del top del lettino: - Poggiatesta integrato - Rettangolare	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh. 24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuzione uniforme
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	343 lb (146 kg)


OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro

Per le specifiche elettriche, vedere la sezione Specifiche.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM200

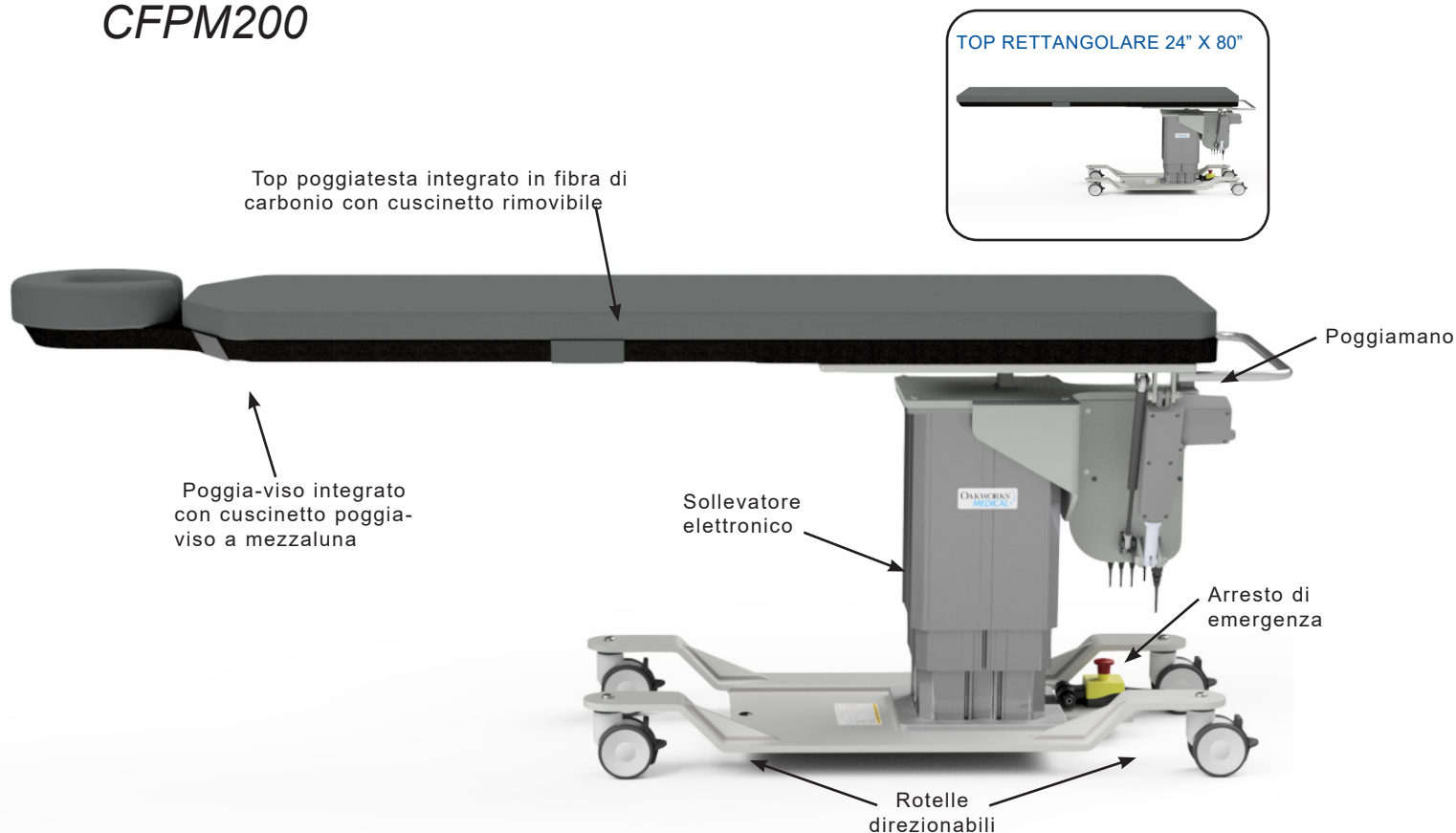

STANDARD SPECIFICATIONS	
Spostamento 1	Alimentato 25"-43" (64-109 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione laterale $\pm 15$ con alimentazione
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Scelta del top del lettino:	
- Poggiatesta integrato	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh.
- Rettangolare	24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	405 lb (148 kg)

OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13 cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Comando a pedale
Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro

For electrical specs, see Specifications section.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 200

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 200 offre l'altezza verticale e il posizionamento di inclinazione laterale con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

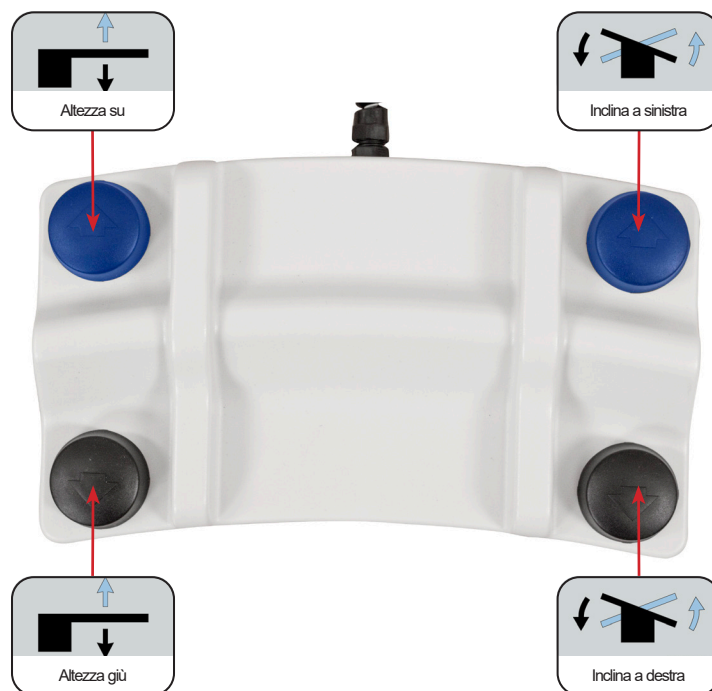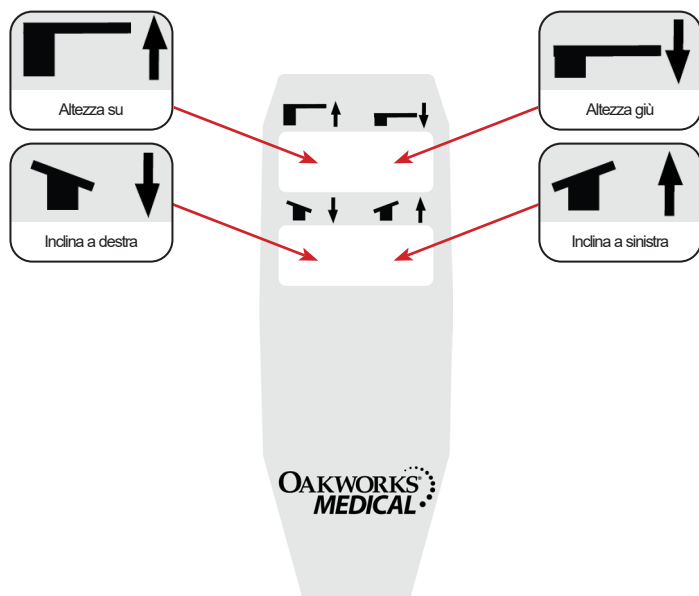


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM300

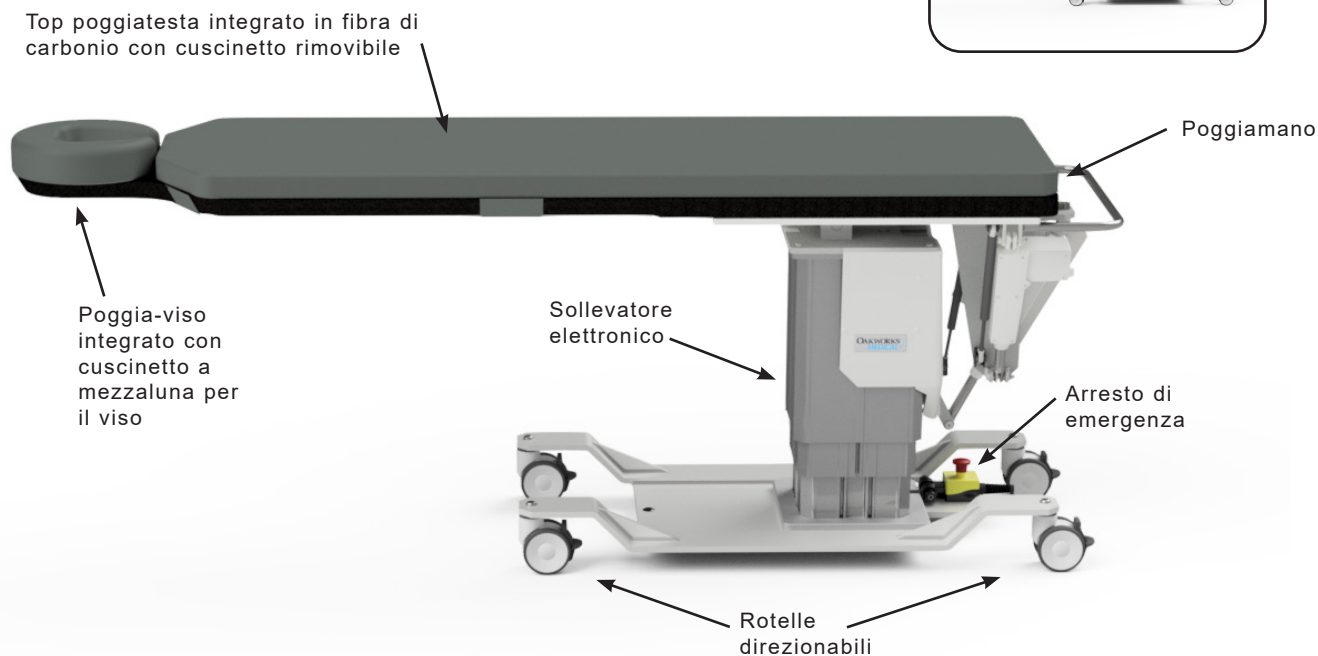

SPECIFICHE STANDARD	
Spostamento I	Alimentato 26"-43" (66-109 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica
Movimento 3	Inclinazione laterale $\pm 15$ con alimentazione
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Scelta del top del lettino:	
- Poggiatesta integrato	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh.
- Rettangolare	24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	498 lb (226 kg)

OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13 cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Comando a pedale
Cuscino per il top del lettino I" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro

For electrical specs, see Specifications section.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 300

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 300 offre il posizionamento in altezza verticale, inclinazione Trendelenburg e inclinazione laterale con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

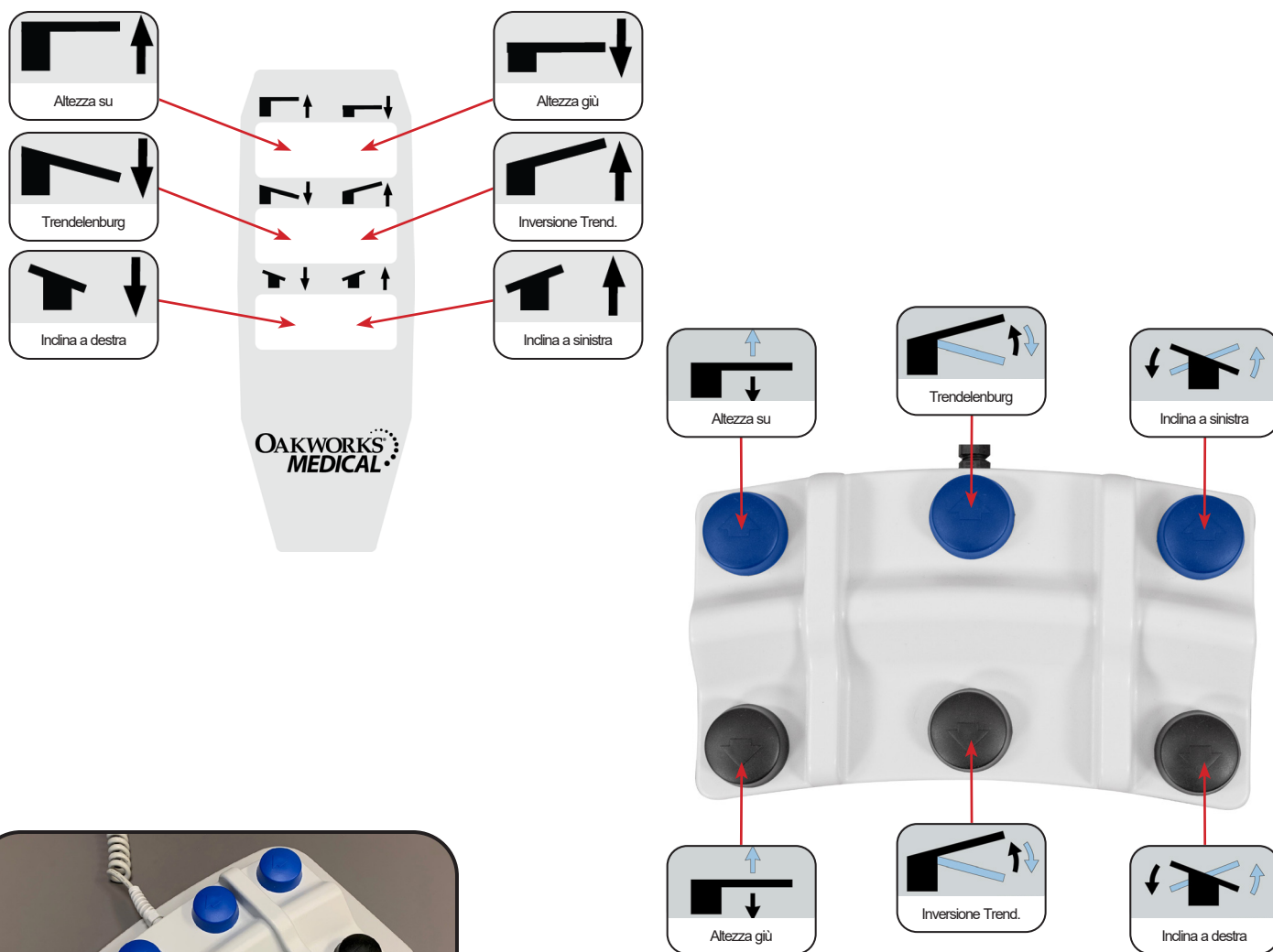


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM400

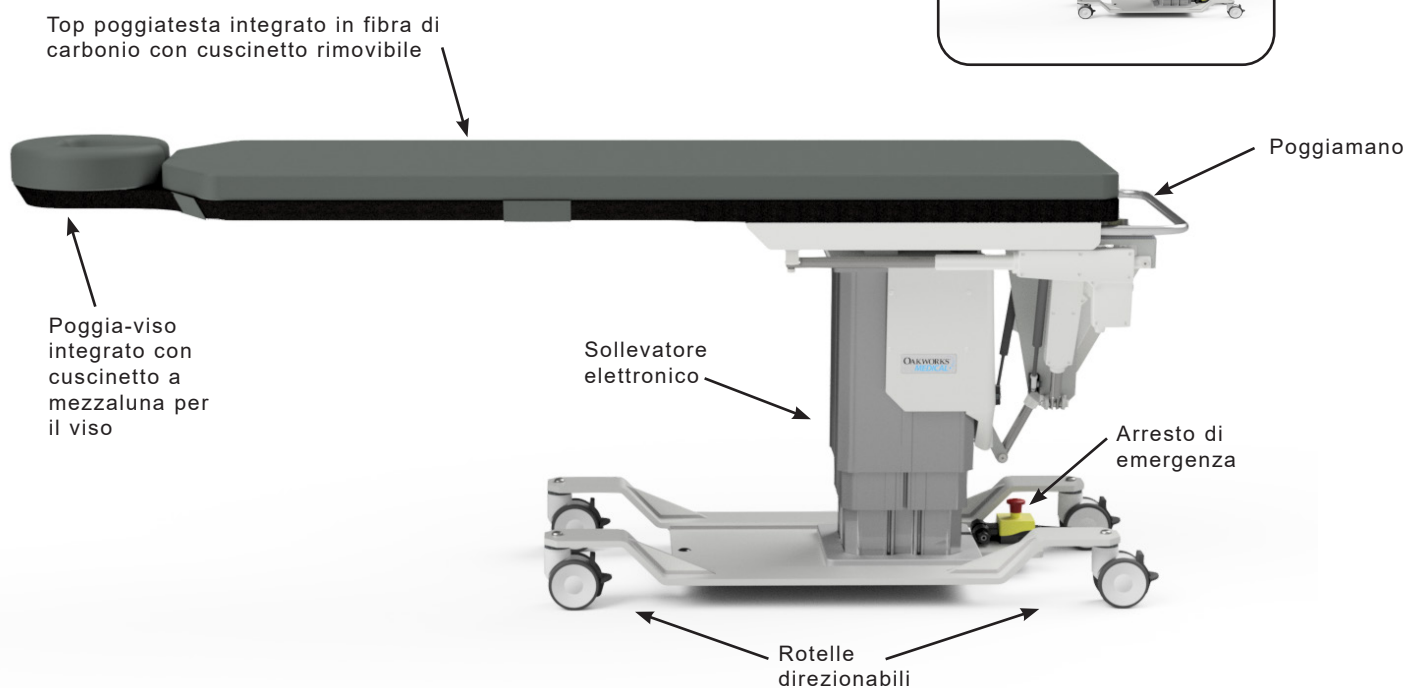

SPECIFICHE STANDARD		OPZIONI	
Spostamento 1	Alimentato 26"-43" (66-109 cm) Escursione in altezza	Rotelle direzionabili 5" (13 cm)	
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica	Configurazioni elettriche internazionali	
Movimento 3	Inclinazione laterale ±15° con alimentazione	Comando a pedale	
Movimento 4	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale	Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)	
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione	ACCESSORI	
Scelta del top del lettino:		Poggiabraccio in fibra di carbonio	
- Poggiatesta integrato	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh.	Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II	
- Rettangolare	24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.	Morsetto guida a T regolabile	
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz	Estensore fluoro	
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente		
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa		
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)		
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato		
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure		
Peso del lettino	498 lb (226 kg)		


Per le specifiche elettriche, vedere la sezione Specifiche.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 400

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 400 offre altezza verticale, inclinazione Trendelenburg, inclinazione laterale e posizionamento longitudinale di viaggio con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del letto prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

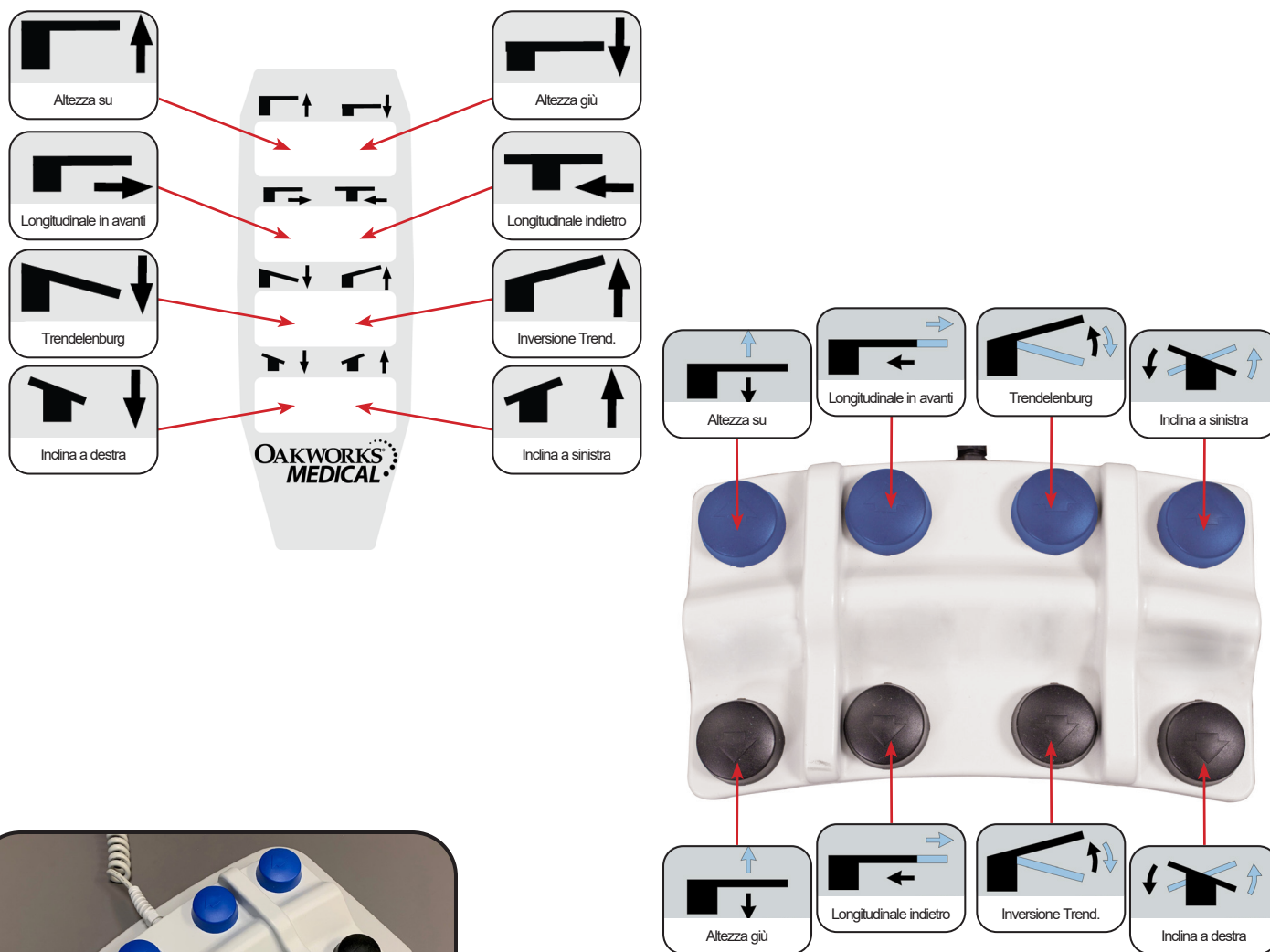


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM201

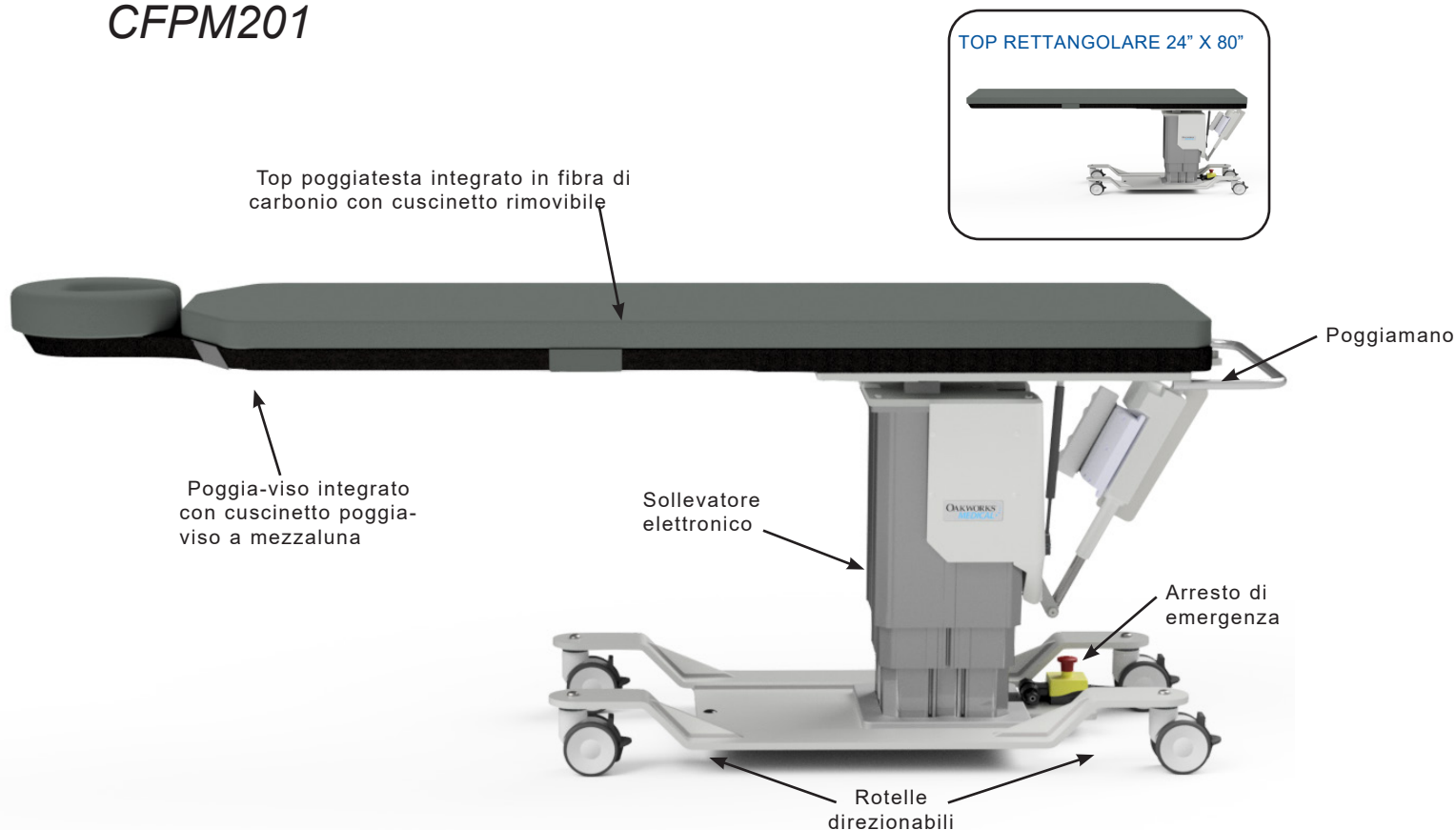

STANDARD SPECIFICATIONS		OPZIONI	
Spostamento 1	Alimentato 25"-42" (64-107 cm) Escursione in altezza	Rotelle direzionabili 5" (13 cm)	
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica	Configurazioni elettriche internazionali	
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione	Comando a pedale	
Scelta del top del lettino: - Poggiatesta integrato - Rettangolare	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh. 24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.	Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)	
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz	ACCESSORI	
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente	Poggiabraccio in fibra di carbonio	
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa	Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II	
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)	Morsetto guida a T regolabile	
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato	Estensore fluoro	
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure		
Peso del lettino	417 lb (189 kg)		

For electrical specs, see Specifications section.



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 201

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 201 offre l'altezza verticale e il posizionamento di inclinazione Trendelenburg con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

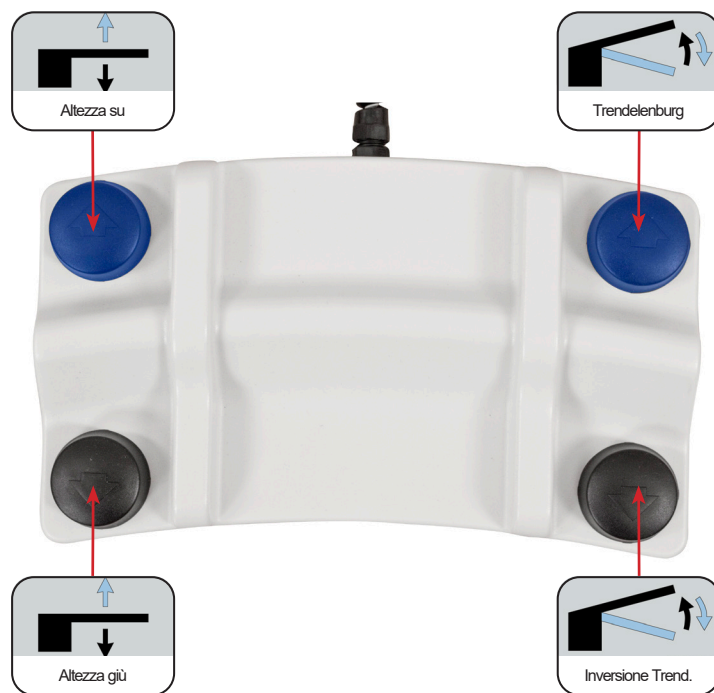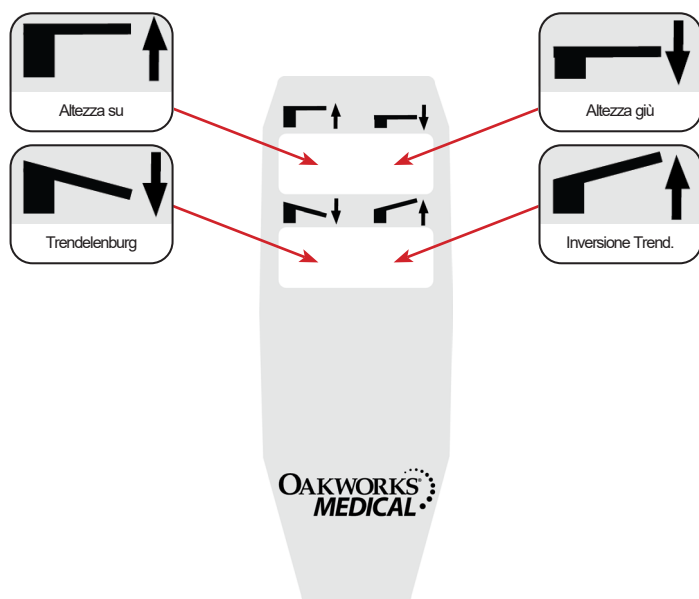


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM301

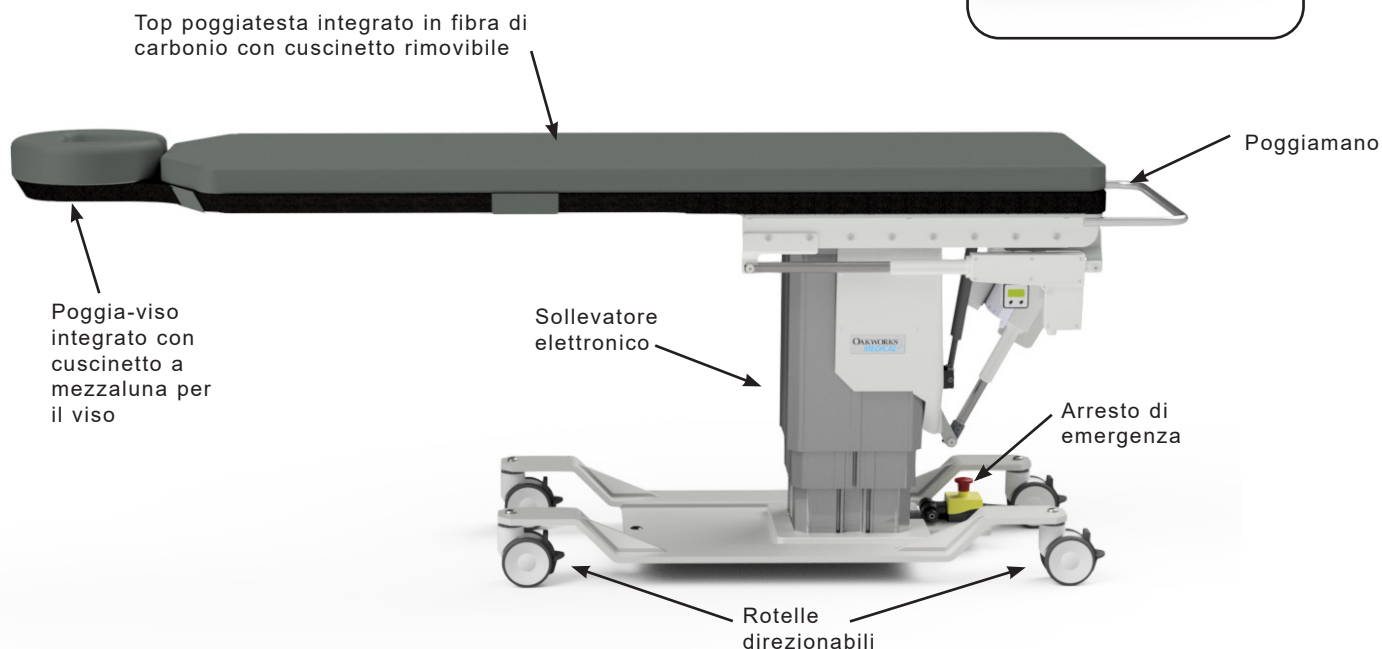

SPECIFICHE STANDARD		OPZIONI
Spostamento 1	Alimentato 25"-43" (64-109 cm) Escursione in altezza	Rotelle direzionabili 5" (13cm)
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica	Configurazioni elettriche internazionali
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale	Comando a pedale
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione	Cuscino per il top del lettino I" (2,5 cm)
Scelta del top del lettino:		<b>ACCESSORI</b>
- Poggiatesta integrato	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lung.	Poggiabraccio in fibra di carbonio
- Rettangolare	24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lung.	Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz	Morsetto guida a T regolabile
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente	Estensore fluoro
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa	
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)	
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato	
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure	
Peso del lettino	538 lb (244 kg)	

For electrical specs, see Specifications section.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 301

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 301 offre l'altezza verticale, l'inclinazione di Trendelenburg e il posizionamento longitudinale della corsa con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

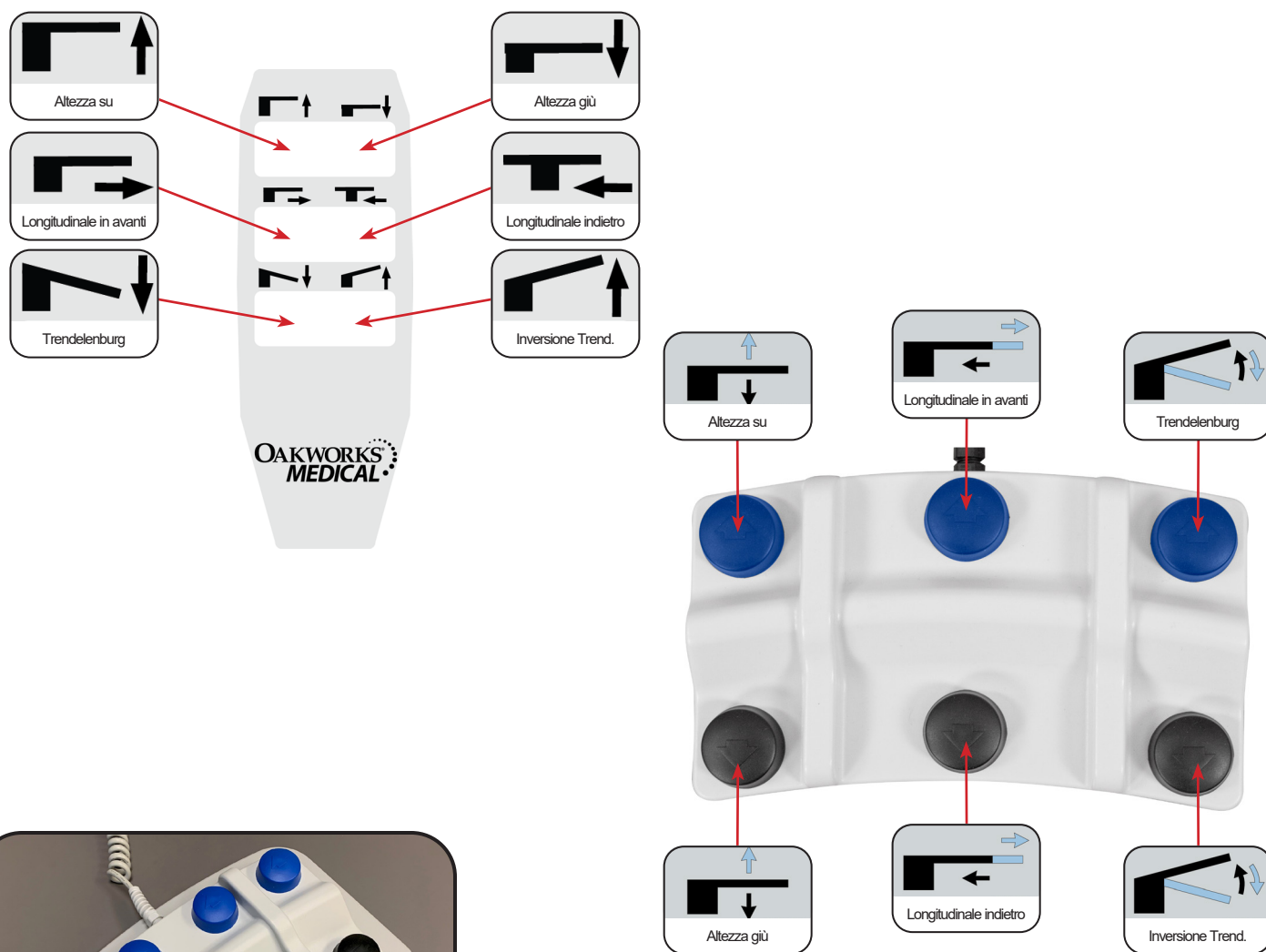



### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM302

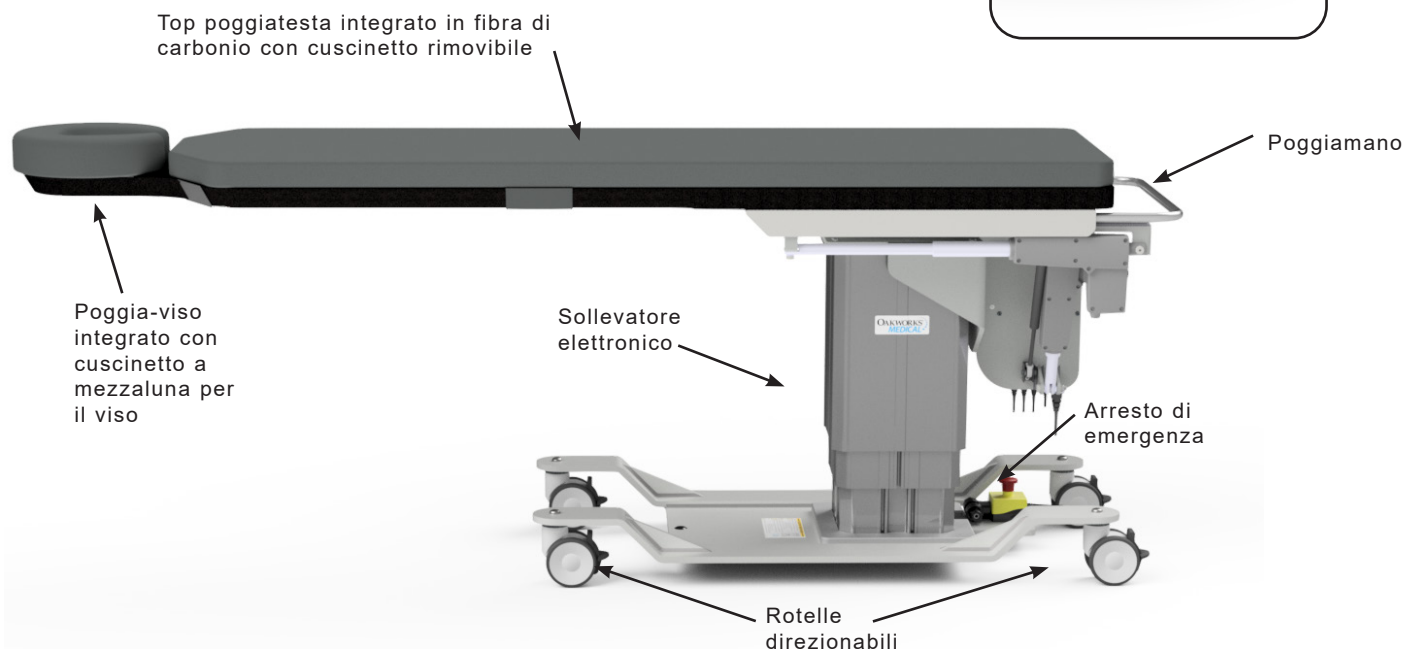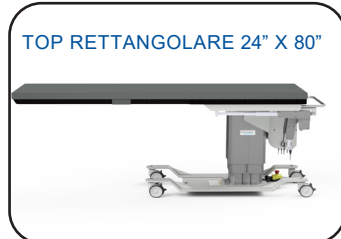

SPECIFICHE STANDARD	
Spostamento 1	Alimentato 25"-43" (64-109 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione laterale $\pm 15^\circ$ con alimentazione
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Scelta del top del lettino:	
- Poggiatesta integrato	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh.
- Rettangolare	24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	407 lb (185 kg)

OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Comando a pedale
Cuscino per il top del lettino I" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro

For electrical specs, see Specifications section.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)


### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 302



#### ATTENZIONE

Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 302 offre l'altezza verticale, la corsa longitudinale e il posizionamento di inclinazione laterale con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

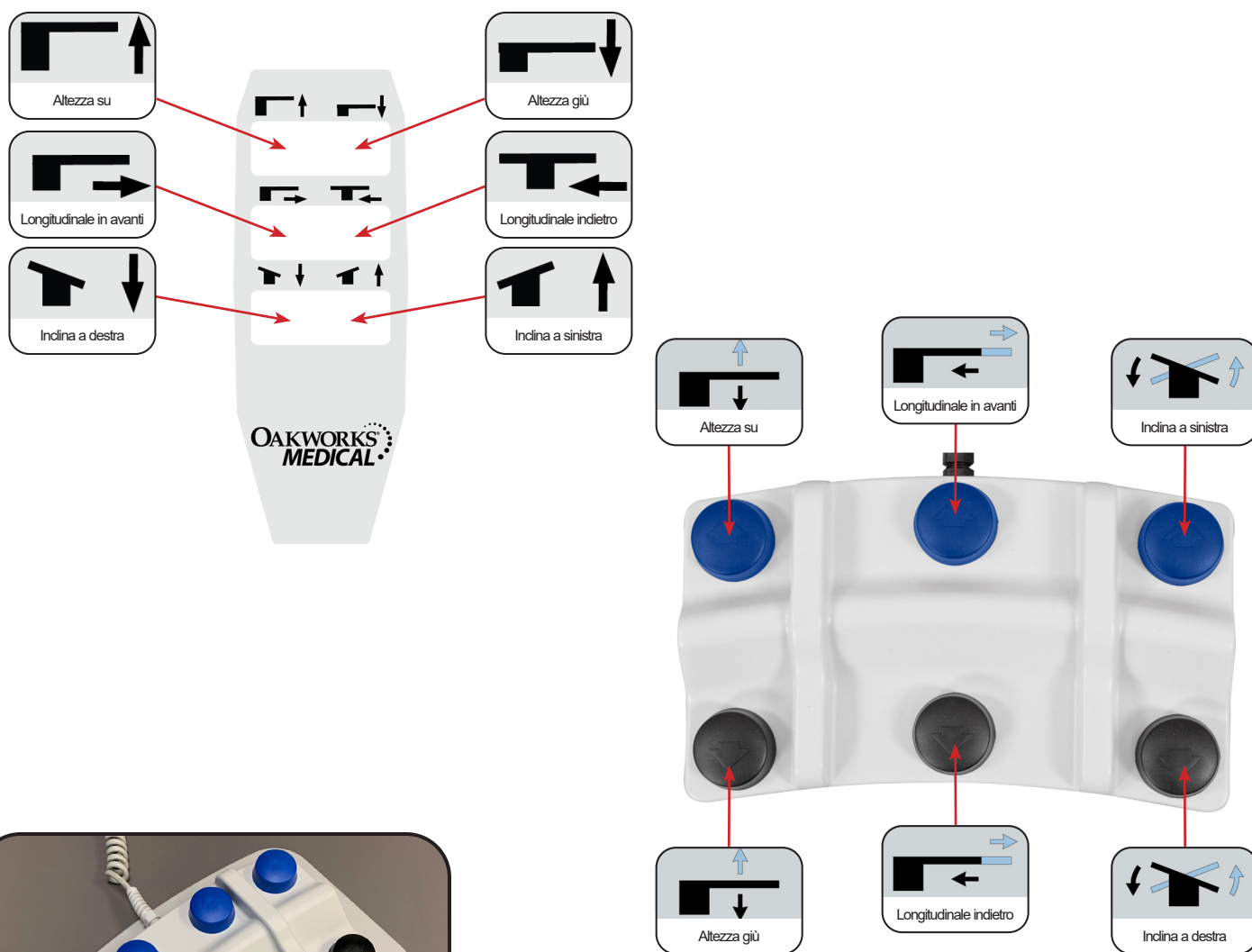


#### ATTENZIONE

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### CFPMB301 - Bariatrico

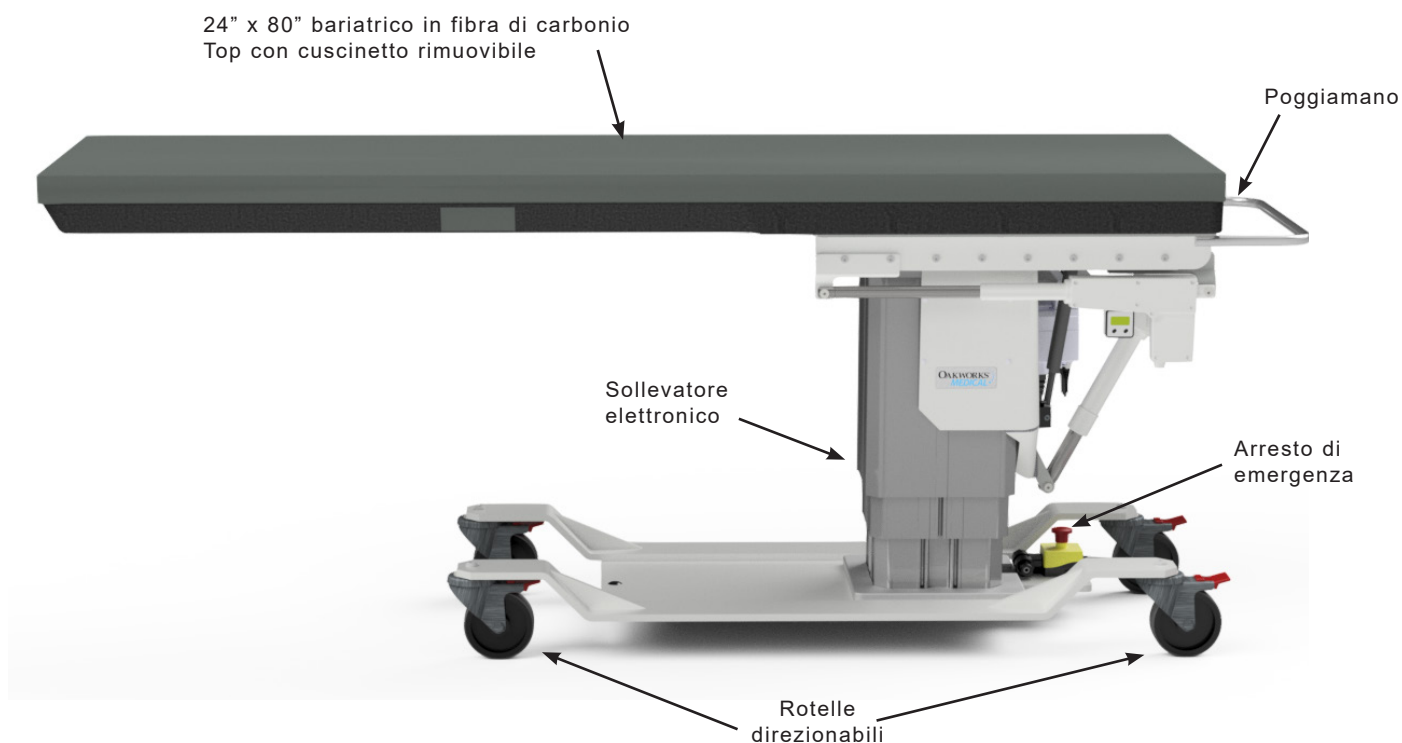

SPECIFICHE STANDARD	
Spostamento 1	Alimentato 26"-44" (66-112 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Top rettangolare	24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz
Capacità lettino	750 lb (340 kg) distribuito uniformemente
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Cuscinetto poggia-viso a mezzaluna	Solo poggiatesta integrato
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	573 lb (260 kg)

OPZIONI
Configurazioni elettriche internazionali
Comando a pedale
Cuscino per il top del lettino I" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro


Per le specifiche elettriche, vedere la sezione Specifiche.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPMB 301 BARIATRICO

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPMB 301 bariatrico offre altezza verticale, inclinazione Trendelenburg e posizionamento longitudinale di viaggio con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

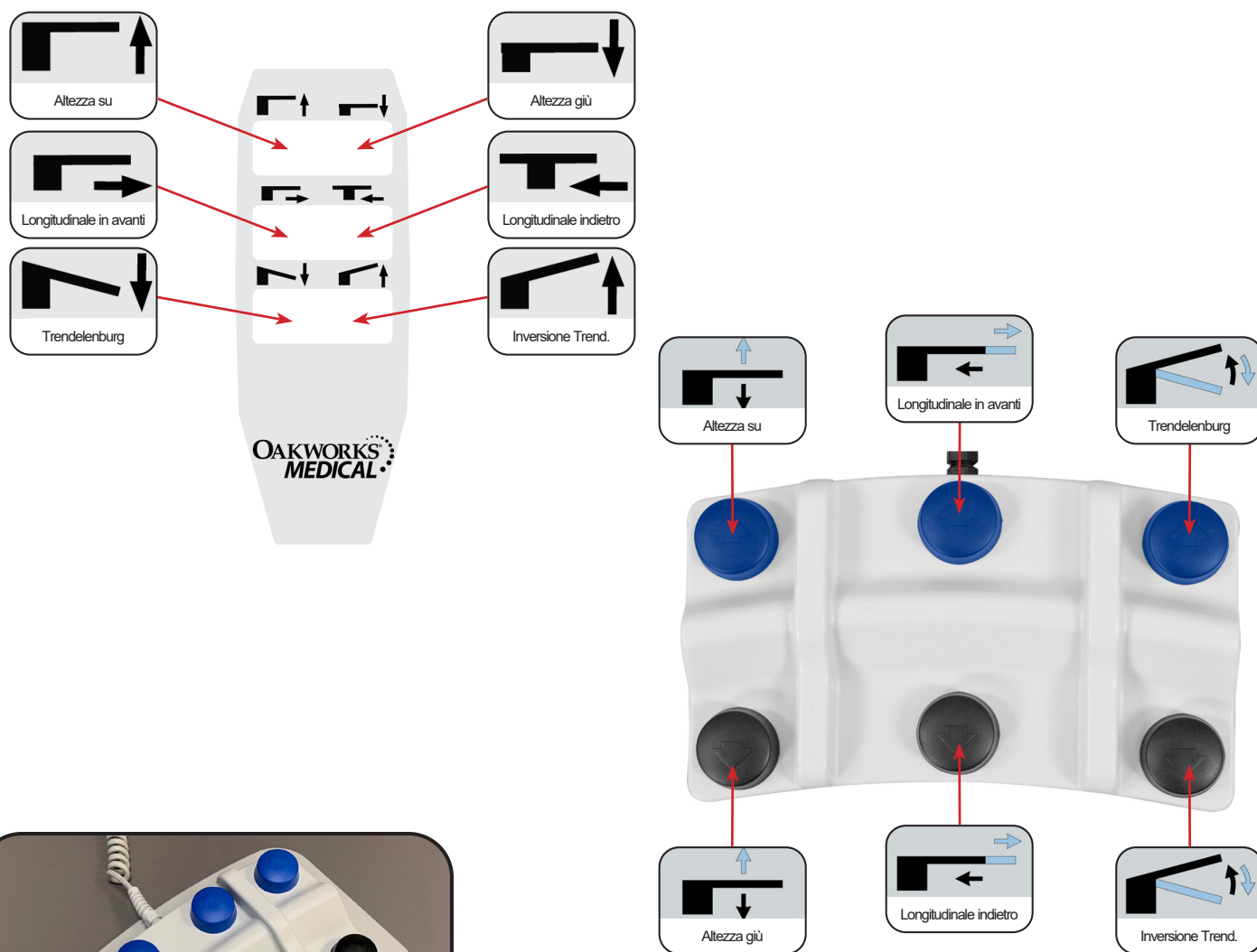


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## CFPM401

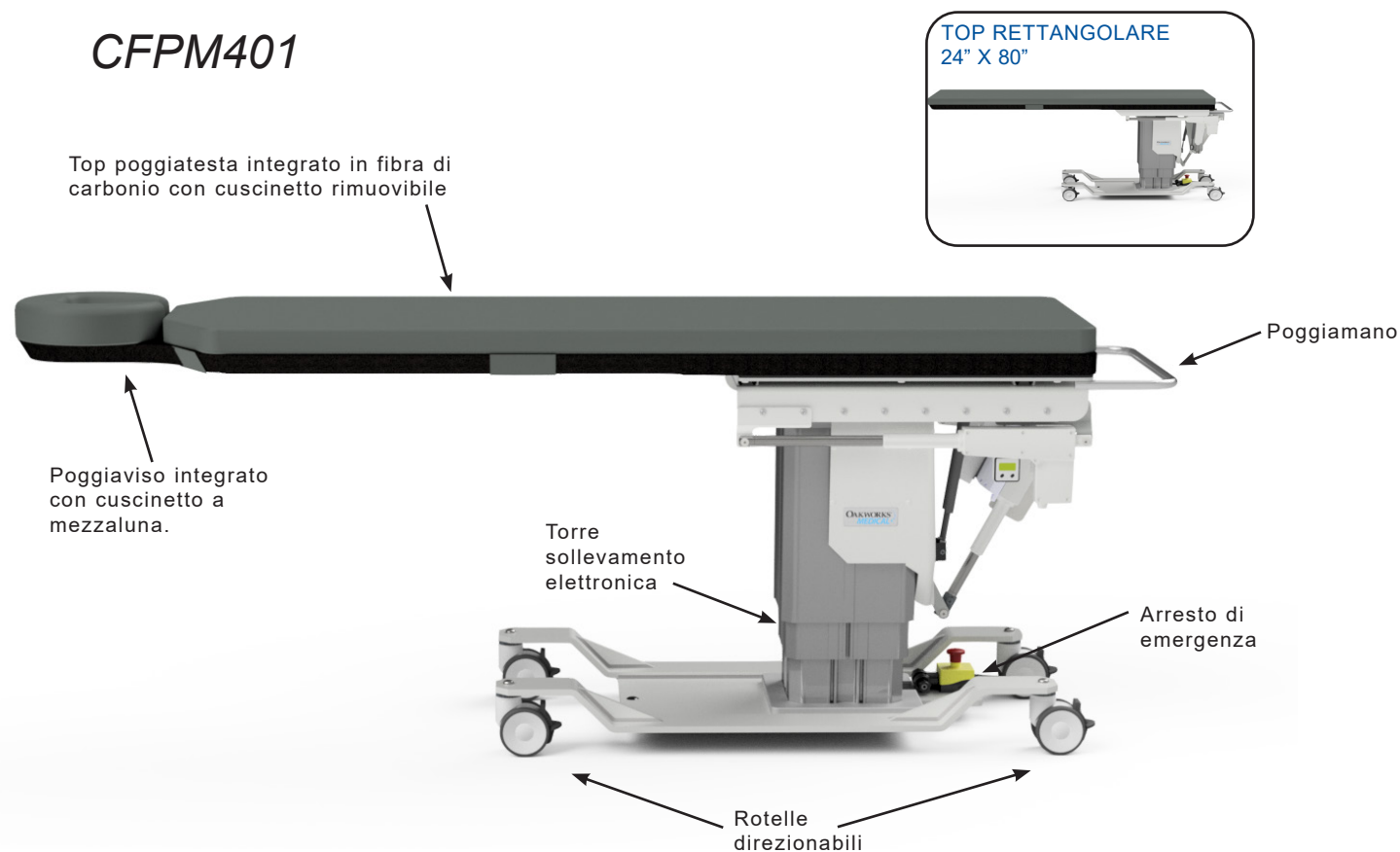

SPECIFICHE STANDARD	
Movimento 1 senza cuscinetto	Alimentato 26"-44" (66-112 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale
Movimento 4	Corsa laterale 8" (20cm) elettrica
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Scelta del top del lettino: - Poggiatesta integrato - Rettangolare	22" (56 cm) Largh. x 84" (214 cm) Lungh. 24" (61 cm) Largh. x 80" (203 cm) Lungh.
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente
4" (10 cm.) Rotelle direzionabili	Blocco/sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Cuscinetto a mezzaluna per il viso	Solo poggiatesta integrato
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	548 lb (249 kg)

OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Comando a pedale
Cuscino per il lettino 1" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Sistema di posizionamento della colonna vertebrale II
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro


# DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

## OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFPM 401

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFPM 401 offre altezza verticale, inclinazione Trendelenburg, corsa longitudinale e posizionamento laterale con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale opzionale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

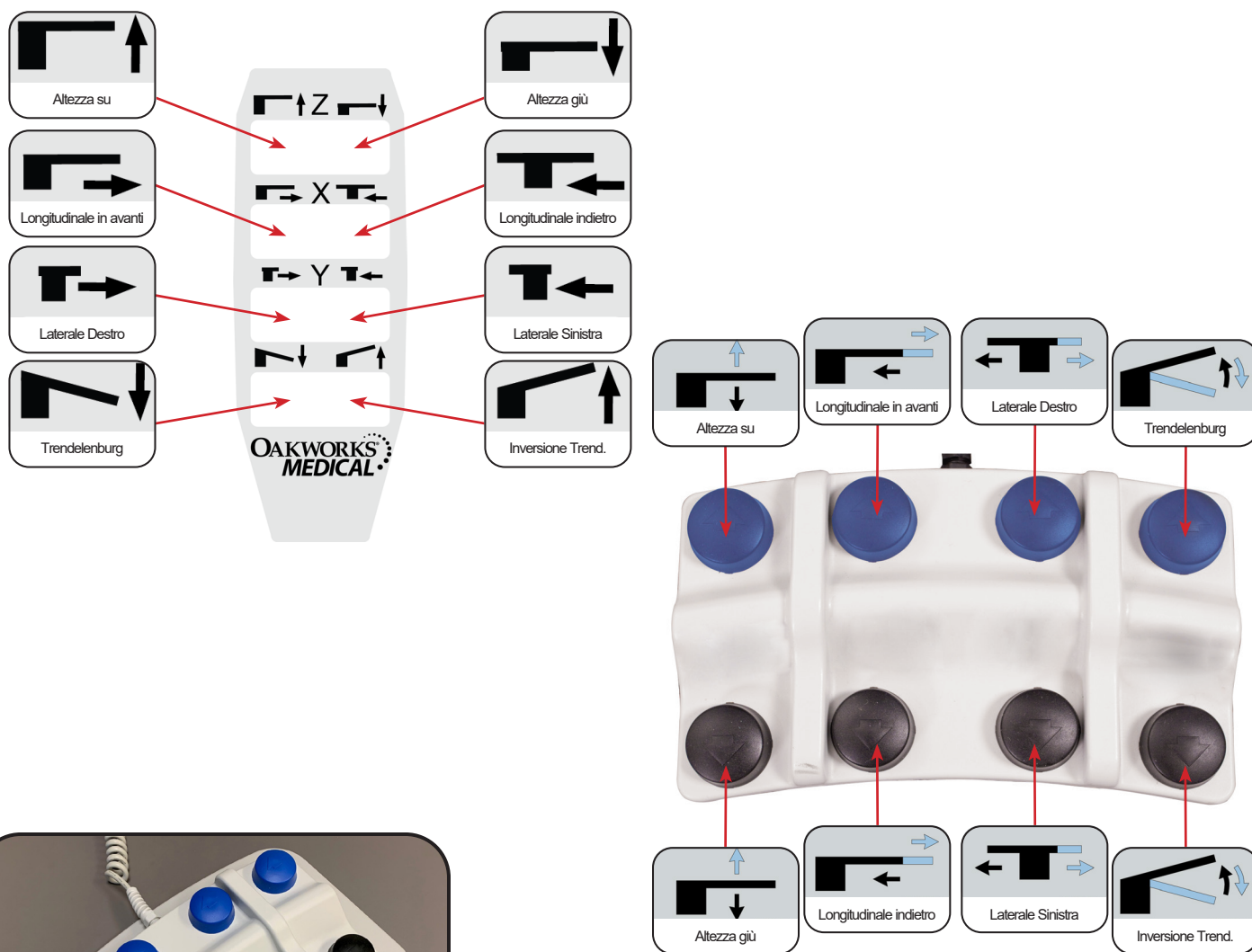


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### CFLU401 - Top per litotripsia/urologia

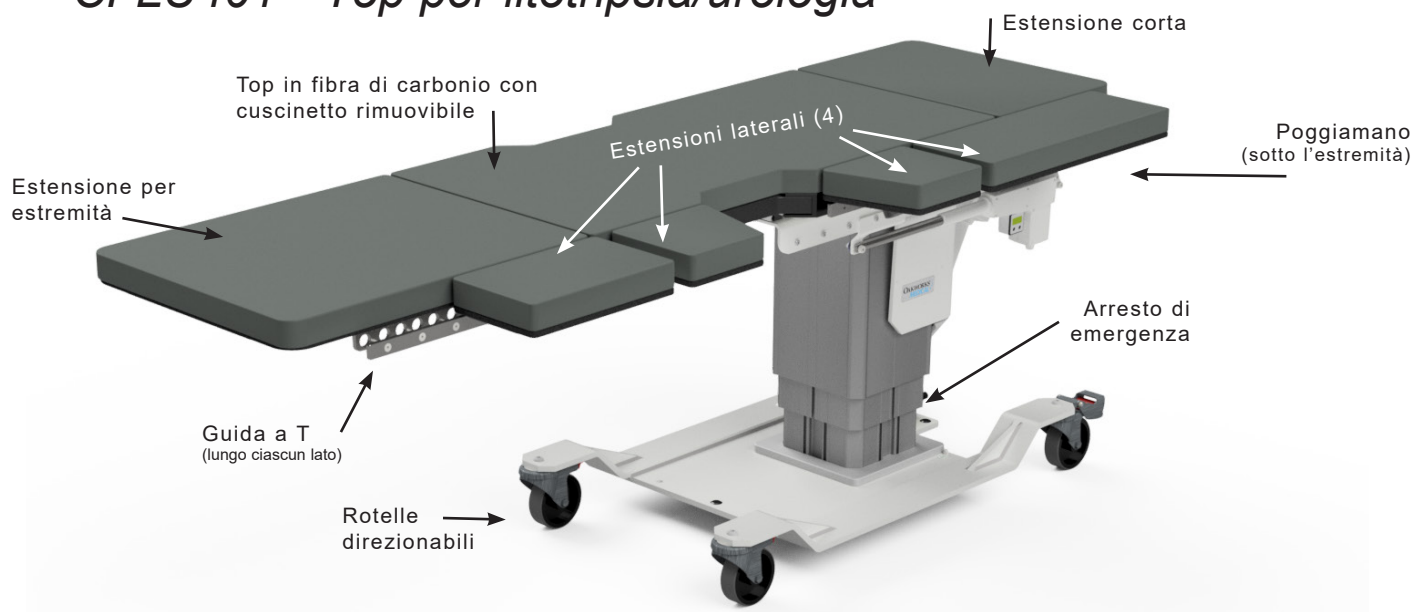

SPECIFICHE STANDARD			
Spostamento 1	Alimentato 27"-45" (66-112 cm) Escursione in altezza	Peso del lettino	618 lb (280 kg)
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica	Anello sacca per urologia	Fermagli su guida a T (sacca non inclusa)
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale	Guide a T integrate	0,38" (1 cm) di spessore x 1,13" (3 cm) di altezza standard USA
Movimento 4	±4" (10 cm) con alimentazione Spostamento laterale	Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione	5" (12,5 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Comando a pedale	Tutti gli spostamenti con alimentazione		
Dimensioni principali top	23" (58 cm) Largh. x 47" (119 cm) Lungh. (dimensioni radiolucanti: 19" (48 cm) Largh. x 23,7" (60 cm))	Estensioni lettino	(1) 23" (58 cm) Largh. x 28" (71 cm) Lungh. - Estremità
Opzioni tensione lettino	120V/60Hz o 230V/50Hz		(1) 23" (58 cm) Largh. x 16" (41 cm) Lungh. <b>OPPURE</b> 23" (58 cm) Largh. x 20" (51 cm) Lungh. - Corto
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente		(2) 8" (20 cm) Largh. x 11" (28 cm) Lungh. - Laterale
	200 lb (91 kg) (su tutte le estensioni)		(1) 8" (20 cm) Largh. x 14" (36 cm) Lungh. - Laterale
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)		(1) 8" (20 cm) Largh. x 24" (61 cm) Lungh. - Laterale

#### OPZIONI

Rotelle direzionabili 4" (10 cm)

Configurazioni elettriche internazionali

Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)

#### ACCESSORI

Poggiabracchio in fibra di carbonio

Estensore fluoro

Telo lito/urologia

Per le specifiche elettriche, vedere la sezione Specifiche.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)


### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFLU 401 TOP PER LITOTRIPSIA/UROLOGIA



#### ATTENZIONE

Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

Il CFLU 401 Litho/Urology offre altezza verticale, inclinazione Trendelenburg, corsa longitudinale e posizionamento laterale della corsa con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del letto prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

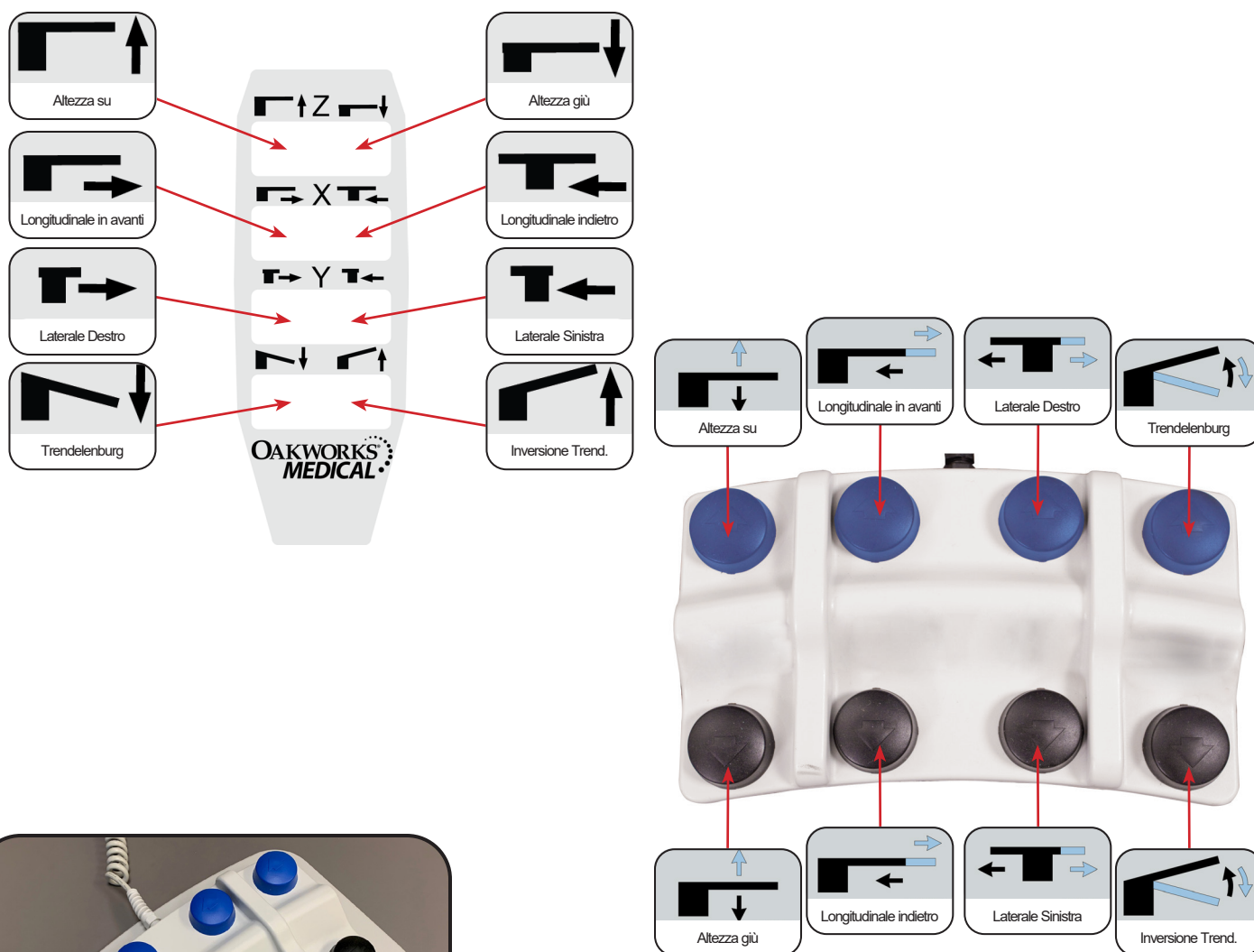


#### ATTENZIONE

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### CFUR301 - Top per urologia

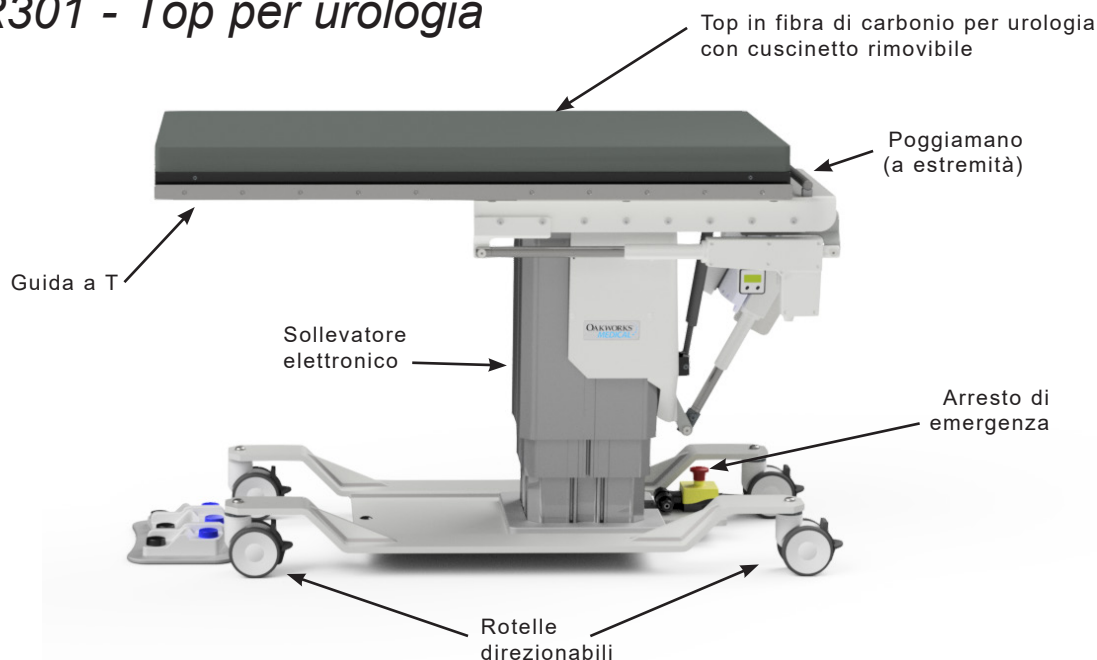

SPECIFICHE STANDARD	
Spostamento 1	Alimentato 25"-43" (64-109 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Comando a pedale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Dimensioni principali top	23" (58 cm) Largh. x 47" (119 cm) Lungh. (dimensioni radiolucenti: 19" (48cm) Largh. x 23,7" (60 cm))
Estensioni lettino	(1) 23" (58,4 cm). Largh. x 28" (71,1 cm). Lungh. - Estremità
	(2) 5" (12,5 cm). Largh. x 24" (61 cm). Lungh. - Laterale
Guide a T integrate	0,38" (1 cm) di spessore x 1,13" (3 cm) di altezza standard USA
Anello sacca per urologia	Fermagli su guida a T (sacca non inclusa)
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente
	200 lb (91 kg) (su tutte le estensioni)
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	568 lb (258 kg)

OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro
Telo lito/urologia

For electrical specs, see Specifications section.


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFUR 301 TOP PER UROLOGIA

**! ATTENZIONE** Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

L'urologia CFUR 301 offre altezza verticale, inclinazione di Trendelenburg e posizionamento longitudinale di viaggio con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del lettino prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

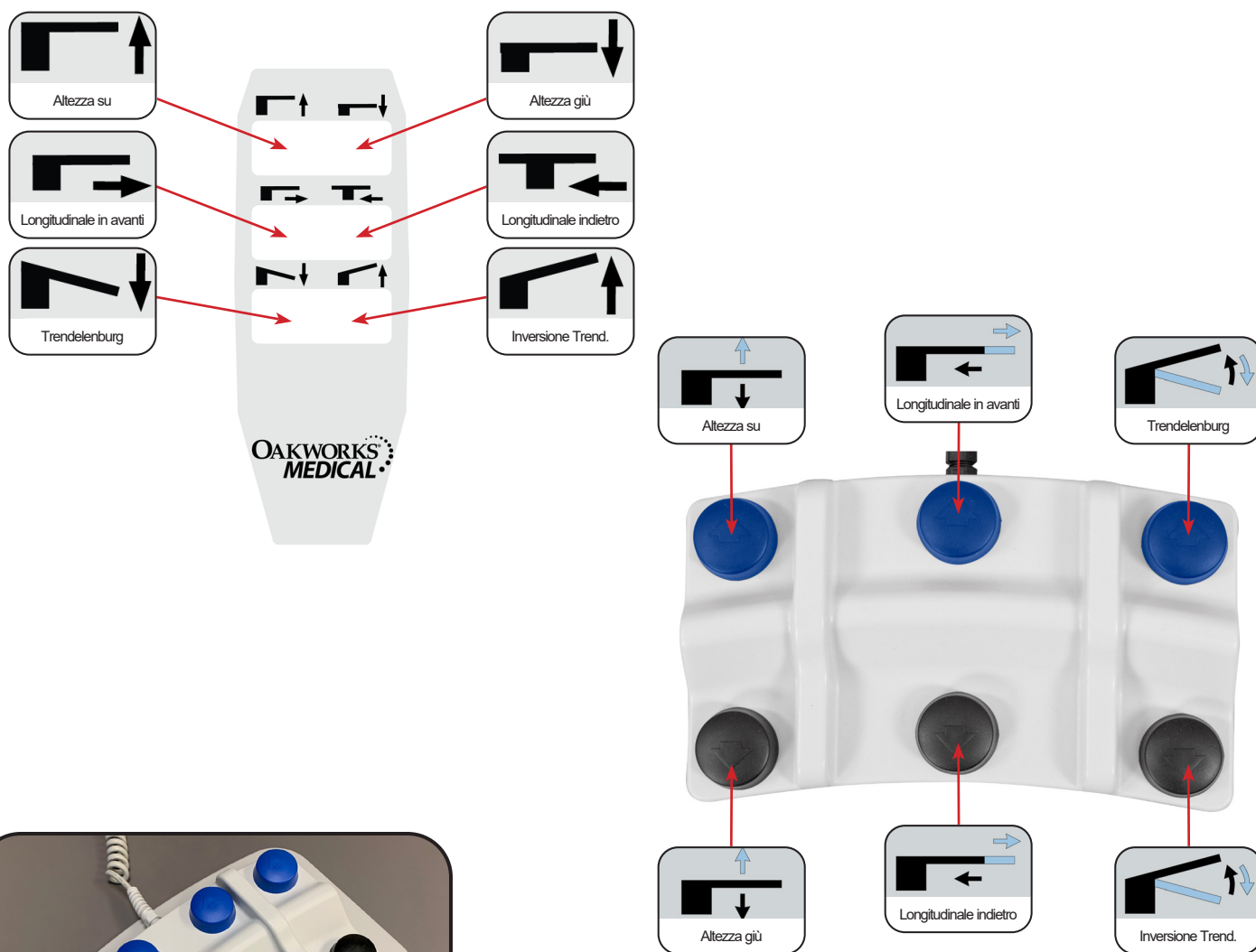


### **! ATTENZIONE**

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)

### CFUR401 - Top per urologia

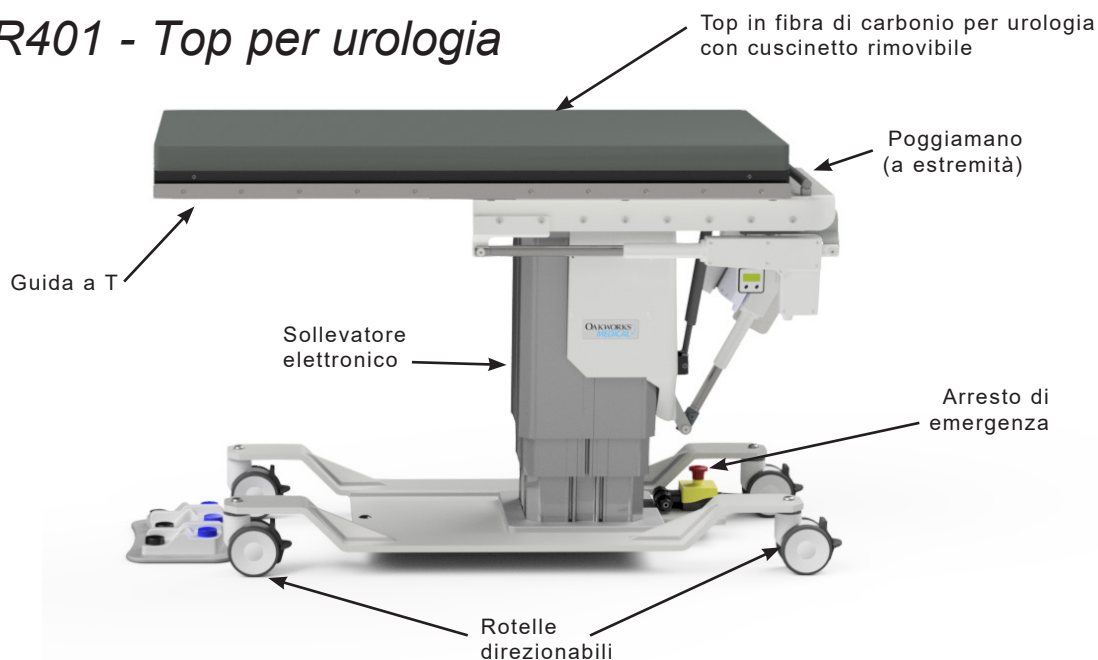

SPECIFICHE STANDARD	
Spostamento 1	Alimentato 28"-46" (71-117 cm) Escursione in altezza
Movimento 2	Inclinazione Trendelenburg 15° elettrica Inclinazione Trendelenburg inversa 11° elettrica
Movimento 3	Alimentato 10" (25 cm) Corsa longitudinale
Movimento 4	Alimentato 8" (20 cm) Corsa laterale
Comando manuale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Comando a pedale	Tutti gli spostamenti con alimentazione
Dimensioni principali top	23" (58 cm) Largh. x 47" (119 cm) Lungh. (dimensioni radiolucenti: 19" (48 cm) Largh. x 23,7" (60 cm)
Estensioni lettino	(1) 23" (58 cm) Largh. x 28" (71 cm) Lungh. - Estremità
	(2) 5" (13 cm) Largh. x 24" (61 cm) Lungh. - Laterale
Guide a T integrate	0,38" (1 cm) di spessore x 1,13" (3 cm) di altezza standard USA
Anello sacca per urologia	Fermagli su guida a T (sacca non inclusa)
Capacità lettino	500 libbre (227 kg) distribuito uniformemente
	200 lb (91 kg) (su tutte le estensioni)
4" (10 cm). Rotelle direzionabili	Blocco / sblocco delle rotelle direzionabili per lo spostamento o per la posizione fissa
Imbottitura	Comfort Foam™ 2" (5 cm)
Fascetta di fermo paziente	Da utilizzare nel corso di tutte le procedure
Peso del lettino	590 lb (268 kg)

Per le specifiche elettriche, vedere la sezione Specifiche.

OPZIONI
Rotelle direzionabili 5" (13cm)
Configurazioni elettriche internazionali
Cuscino per il top del lettino 1" (2,5 cm)
ACCESSORI
Poggiabraccio in fibra di carbonio
Morsetto guida a T regolabile
Estensore fluoro
Telo lito/urologia

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (PRODOTTI DELLA FAMIGLIA PER IMAGING E GESTIONE DEL DOLORE)


### OPERAZIONI DI CONTROLLO - CFUR 401 TOP PER UROLOGIA



#### ATTENZIONE

Non applicare una forza eccessiva al comando a pedale poiché potrebbe danneggiarlo. Non utilizzare il comando a pedale se sono visibili segni di usura o danni poiché ciò può causare movimenti involontari.

L'urologia CFUR 401 offre l'altezza verticale, l'inclinazione di Trendelenburg, la corsa longitudinale e il posizionamento laterale della corsa con facilità elettronica. Azionare la pulsantiera e il pedale come mostrato di seguito per controllare queste funzioni del tavolo. Testare ciascuna delle funzioni del letto prima dell'uso con un paziente. Mettere via il controllo manuale quando non è in uso sul corrimano attaccato sul retro del piano del tavolo.

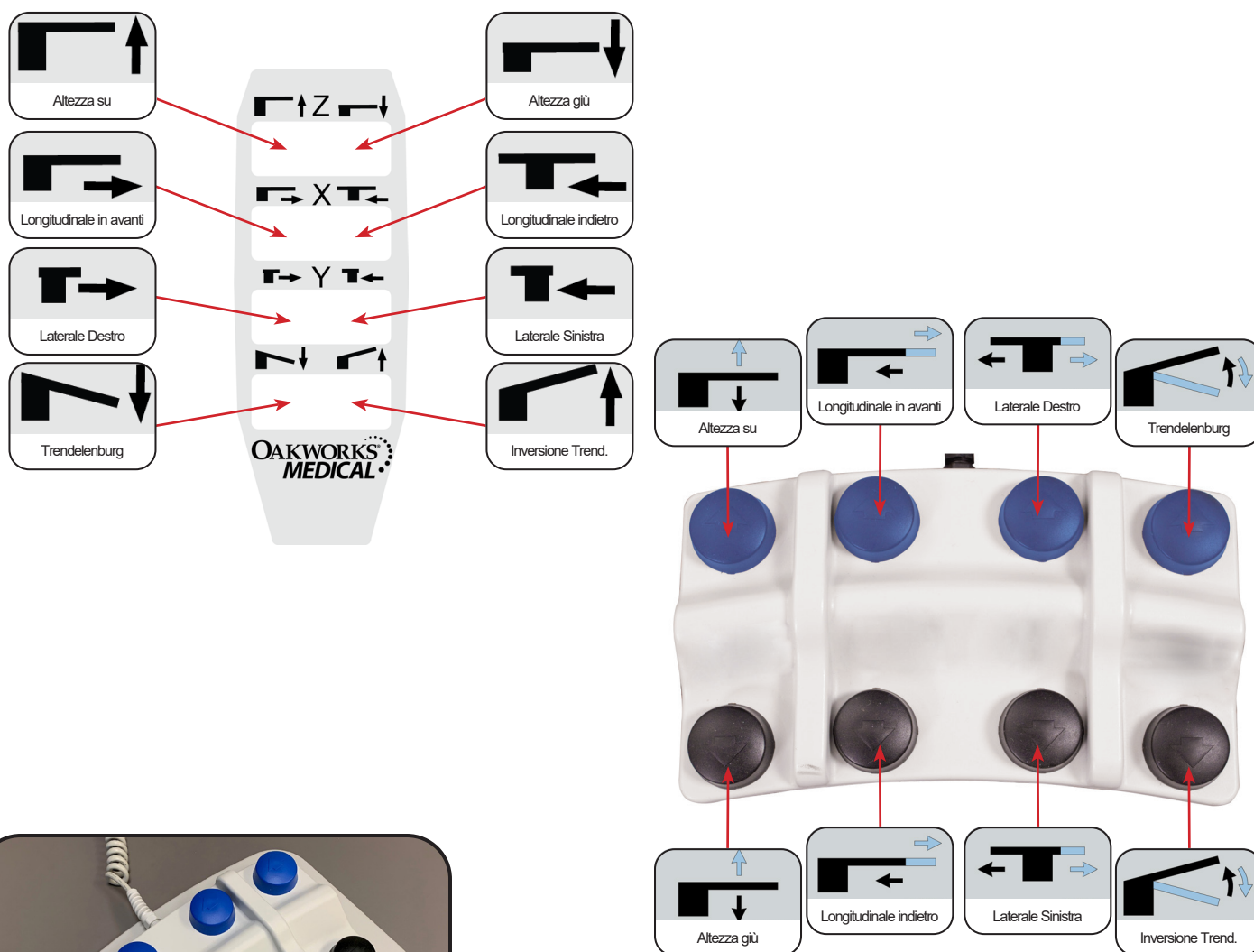

#### ATTENZIONE

La piastra di sollevamento con comando a pedale evita che il comando a pedale resti incastrato al di sotto della base del tavolo o tra la colonna e la base quando la colonna si abbassa. Questo riduce il rischio di un movimento accidentale del tavolo a causa dell'attivazione involontaria dei pulsanti del pedale.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### LIVELLA A BOLLA

Una livella a bolla è montata sulla maniglia del tavolo per aiutare l'operatore a definire il piano orizzontale.



### CINGHIE DI SICUREZZA PER PAZIENTI

#### ATTENZIONE

Le due cinghie di contenzione del paziente dovrebbero essere utilizzate durante le procedure per impedire al paziente di muoversi sul tavolo.

La cinghia ha una chiusura a Velcro alle estremità. La cinghia si fissa come segue:

1. Mettere il centro di ciascuna cinghia attorno al paziente in due punti. Muovere le cinghie quel tanto che basta per una clearance adeguata.
2. Portare le estremità di ciascuna cinghia verso il basso attorno al top del lettino. Tirare ciascuna cinghia aderente sotto al lettino e premere assieme le due estremità.
3. Controllare entrambe le cinghie per verificare che il paziente sia fissato adeguatamente prima di effettuare le funzioni Trendelenburg.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### RIMUOVERE / SOSTITUIRE IL CUSCINETTO DEL TOP DEL LETTINO



#### ATTENZIONE

Verificare che il top non si muova quando si rimuove o si ricolloca il cuscino del lettino.

Rimuovere il cuscinetto tirando le alette alle estremità e ai lati del lettino fino a che la chiusura tipo gancio e anello non si sgancia.

Sostituire il cuscinetto centrandolo prima sul lettino e poi premendo le alette per metterle in posizione agganciando la chiusura gancio e anello.



Lato inferiore del top

### REGOLAZIONE DEL CUSCINETTO POGGIA-VISO A MEZZALUNA (SOLO TOP CON POGGIATESTA INTEGRATI)

Posizionamento prono/supino:

Il cuscinetto poggia-viso a mezzaluna viene tenuto fermo da chiusure a gancio e anello.

Collocare vicino al bordo del lettino con i lati vicini per pazienti di taglia piccola o più lontano dal bordo con lati distanziati per pazienti di taglia maggiore.



## ISTRUZIONI PER L'USO

### USO DELLE ROTELLE DIREZIONABILI

Le quattro rotelle devono essere bloccate sempre durante l'uso con un paziente.



#### BLOCCO DELLE RUOTE



1. Mettere la scarpa sull'estremità della linguetta di blocco delle ruote.
2. Premere bene fino a sentire un clic; la ruota è bloccata.

#### SBLOCCO DELLE RUOTE


1. Posiziona la scarpa contro la linguetta di bloccaggio verticale.
2. Spingere fermamente verso l'interno fino a quando non si sente un clic e l'incantatore viene sbloccato.

### ARRESTO D'EMERGENZA

Tutti i tavoli elettrici sono dotati di un interruttore di arresto di emergenza per interrompere l'alimentazione dal tavolo in caso di emergenza. Si noti che questo non è un ripristino della tabella.

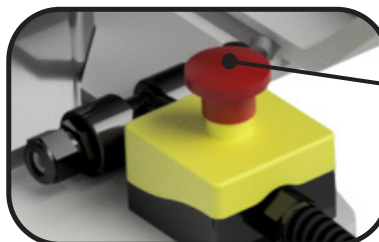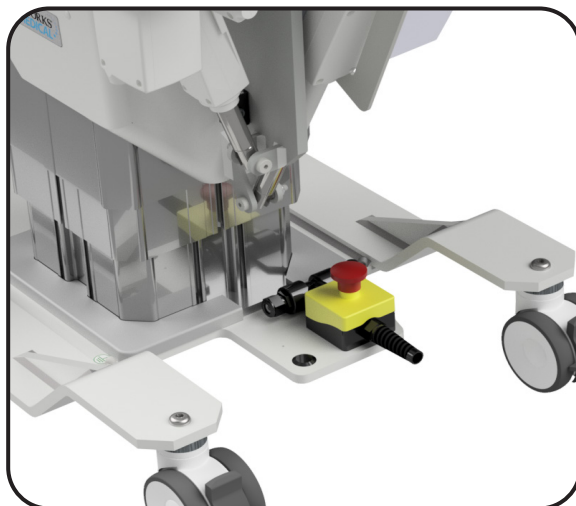

Per interrompere il funzionamento, premere il pulsante rosso.

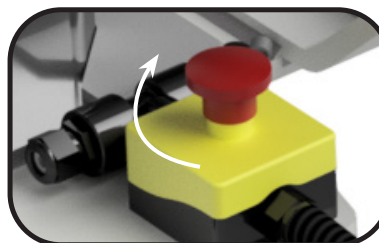


Se necessario, è anche possibile rimuovere la spina dalla presa. Assicurarsi che l'accesso non sia bloccato per scollegare il lettino dall'alimentazione.

## ISTRUZIONI PER L'USO


### PORTATA E USO PAZIENTE

**! ATTENZIONE** Il top del lettino OAKWORKS® è omologato per 500 lb (227 kg) di peso distribuito in modo uniforme. (Il lettino bariatrico è omologato per 750 lb (340 kg)). Per minimizzare qualsiasi rischio per il paziente, evitare che questi si sieda sull'area del poggia-viso al di là della linea di sicurezza del lettino. Le ruote devono essere bloccate quando il paziente sale o scende dal lettino. Il lettino deve essere perfettamente orizzontale quando il paziente sale e scende. Il paziente non deve salire o scendere vicino alla colonna di sollevamento. Il top del lettino deve essere portato completamente all'indietro dopo ciascun utilizzo.

NON sedere al di là di questo punto.

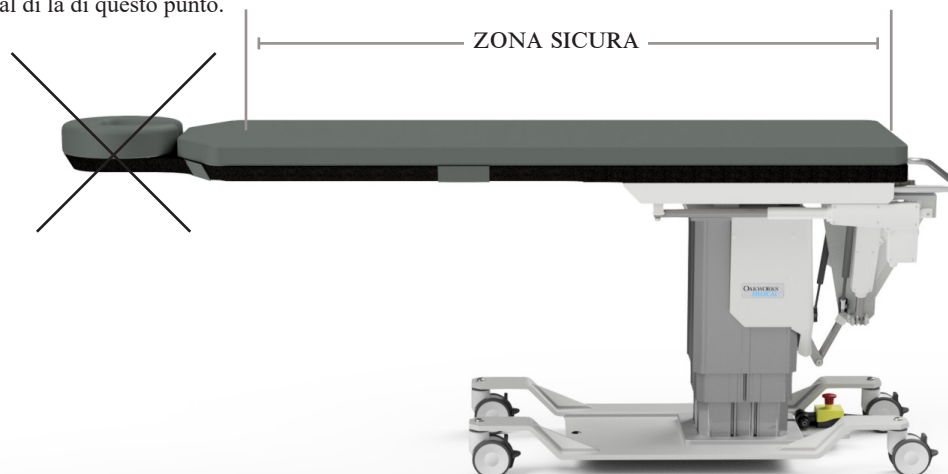

### ANELLO PER SACCA DEL LETTINO PER UROLOGIA

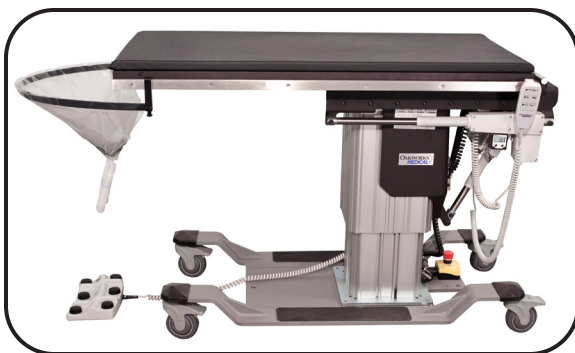

1. Far scorrere la sacca sull'anello.



2. Fissare le estremità dell'anello alle estremità delle guide a T del lettino. Stringere le estremità dell'anello sulla guida a T.







Montaggio completato.

## ISTRUZIONI PER L'USO

### ESTENSIONI LATERALI - TOP PER LITOTRIPSIA/UROLOGIA E UROLOGIA

**! ATTENZIONE** Non sedersi sulle estensioni. Limite di peso: 200 lb / 91 kg.


Ci sono quattro estensioni laterali per il lettino per litotripsia. (2 - 8" x 11", 1 - 8" x 14" e 1 - 8" x 24").

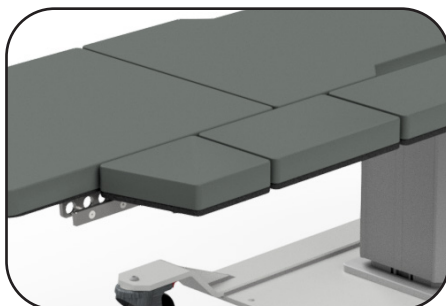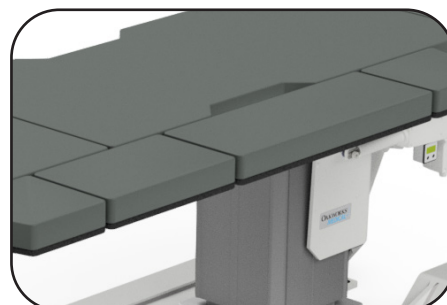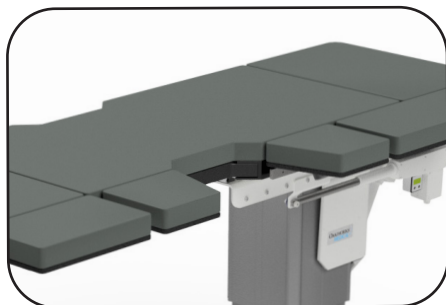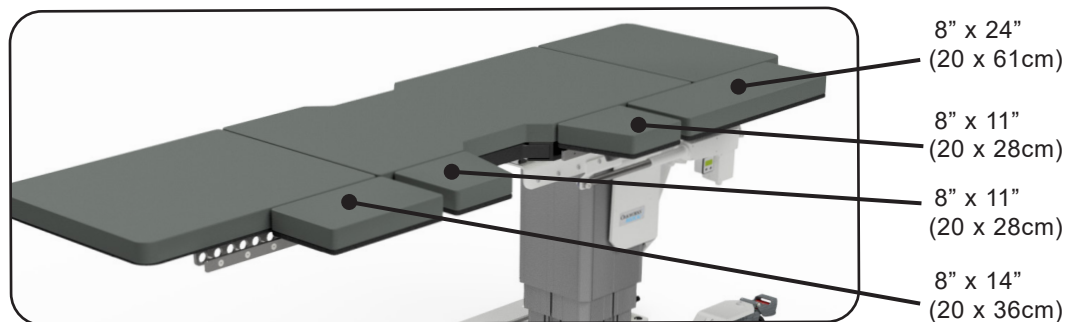

**! ATTENZIONE**

Stringere la manopola in modo sicuro per evitare che l'estensione si allenti

Ci sono 2 estensioni laterali per il lettino per urologia (2) 5" x 24" (13 x 61 cm). Queste estensioni possono essere usate secondo le esigenze per prolungare la larghezza effettiva del lettino.

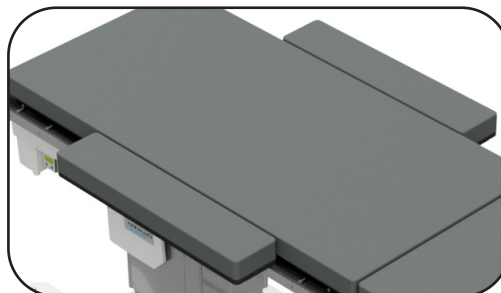

## ISTRUZIONI PER L'USO

### ESTENSIONI PER ESTREMITÀ - TOP PER LITOTRIPSIA/UROLOGIA E UROLOGIA

**! ATTENZIONE** Non sedersi sulle estensioni. Limite di peso: 200 lb / 91 kg.

Ci sono estensioni che possono essere inserite a entrambe le estremità del lettino. (1) - 23" x 28" (58 x 71 cm) e (1) - 23" x 16" (58 x 41 cm) - Litotripsia/Urologia, (1) - 23" x 28" (58 x 71 cm) - Urologia



#### PER INSERIRE L'ESTENSIONE

Far scorrere i due "bracci" nelle estremità del top del lettino. Spingendo completamente, i bracci dell'estensione ricadono leggermente in un perno di blocco.



#### PER RIMUOVERE L'ESTENSIONE

Sollevarla leggermente ed estrarla dal top del lettino.



#### FISSAGGIO SCORRETTO

L'estensione dovrebbe essere a livello con il piano del tavolo e piatta contro l'estremità del tavolo.



#### FISSAGGIO CORRETTO

Tirare l'estensione per assicurarsi che sia bloccata in posizione.

### LETTINO PER LITOTRIPSIA USATO COME LETTINO PER UROLOGIA

Se le estensioni sono rimosse dal lettino per litotripsia, il lettino può essere utilizzato come lettino per urologia. Il lettino ha un anello per sacca in dotazione. (Fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'anello per sacca per lettino per urologia).



## ISTRUZIONI PER L'USO

### POGGIABRACCIO IN FIBRA DI CARBONIO (ACCESSORIO)



#### ATTENZIONE

Non mettere pesi eccessivi o pressione verso il basso sul poggia braccio in fibra di carbonio. È un dispositivo di posizionamento per le braccia e non deve essere usato come appoggio per salire o scendere dal lettino. Potrebbero derivarne lesioni. NON superare 30 lb. (14 kg). di carico sulla **Sezione di supporto**. Potrebbero verificarsi infortuni.


#### Utilizzo

Questo dispositivo radiolucido può essere utilizzato con qualunque superficie di supporto piatta in cui si utilizzano radiazioni ionizzanti (raggi X) per imaging. Può essere utilizzato come supporto di braccia e piedi.

#### Istruzioni

Distendere il poggia braccio e far scorrere la **Sezione di base** sotto il paziente e il cuscinetto. Posizionare il paziente e la **Sezione di supporto** secondo le esigenze della procedura. Il peso del paziente terrà fermo il poggia braccio.


Ruotare la **Sezione di supporto** sulla posizione desiderata. Questa sezione ruota fino a 180°.

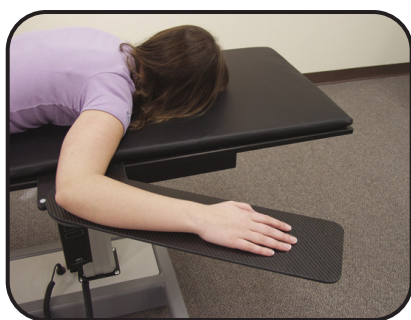

Posizione prona a 135°



Posizione supina a 180°

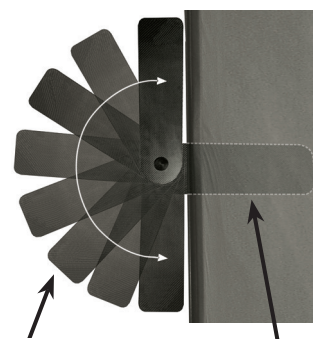

Sezione di supporto Sezione di base

Per rimuovere il poggia braccio, chiedere al paziente di togliere l'arto dalla **Sezione di supporto** e di sollevare leggermente il corpo. Questo consente di estrarre la sezione di base del poggia braccio.

Piegare le **sezioni della base e di supporto** per riporre l'unità.

### UTILIZZO DEL MORSETTO DELLA GUIDA A T REGOLABILE (ACCESSORIO)\*



#### ATTENZIONE

Ricontrollare la tenuta del morsetto della guida a T tra una procedura e l'altra. Assicurarsi che la parte inferiore del morsetto sia nella scanalatura sotto al lettino. Assicurarsi che il morsetto della guida a T sia stretto e che non possa muoversi sotto pressione.

1. Il morsetto deve essere installato solo su un prodotto Oakworks® CFPM con la scanalatura sul lato inferiore del lettino.
2. Far scorrere il morsetto nella scanalatura fino alla posizione desiderata sul lettino.
3. Assicurarsi che la parte inferiore del morsetto sia allineata con e nella scanalatura del lettino. Stringere il morsetto utilizzando il manico.
4. Tentare di far scorrere il morsetto. Assicurarsi che il morsetto non si sposti e che sia fissato in modo fermo al lettino.
5. Il manico può essere ruotato senza allentare il morsetto. Per spostare il manico fuori dal percorso, sollevare il manico e ruotarlo verso la parte interna del lettino, poi rilasciare il manico per reimpegnarlo. Il manico può quindi essere utilizzato per stringere o allentare il morsetto e scorrere su una posizione diversa del tavolo.



**Nota: Le guide a T integrate sono delle dimensioni standard USA di ,38" (1 mm) di spessore per 1,13" (3 mm) di larghezza.**

## ISTRUZIONI PER L'USO

### SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DELLA COLONNA VERTEBRALE II (ACCESSORIO)

Per istruzioni sull'uso del sistema di posizionamento della colonna vertebrale, fare riferimento al Manuale dell'utente SPS II.



### ESTENSORE FLUORO (ACCESSORIO)



#### ATTENZIONE

Non mettere pesi eccessivi o pressione verso il basso sull'estensore fluoro. È un dispositivo di posizionamento per le braccia e non deve essere usato come appoggio per salire o scendere dal lettino. Potrebbero derivarne lesioni.


L'estensore fluoro Oakworks è radiolucente e garantisce una ampiezza extra solo quando serve maggiore accuratezza della posizione con imaging ottimale. L'estensore fluoro è inserito sotto il cuscinetto.




## RIFERIMENTO

AREA UTILIZZABILE PER L'IMAGING - CFPM100  
SOLO TOP CON POGGIATESTA INTEGRATI


### CENTRATO PER UNA VISUALIZZAZIONE A-P:

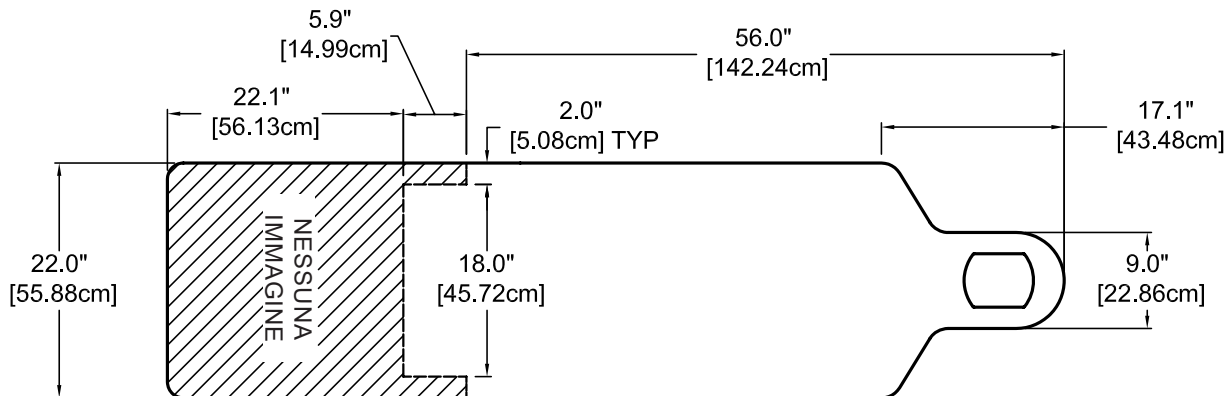

### VISUALIZZAZIONE OBLIQUA A 30° PER VERTICALE:

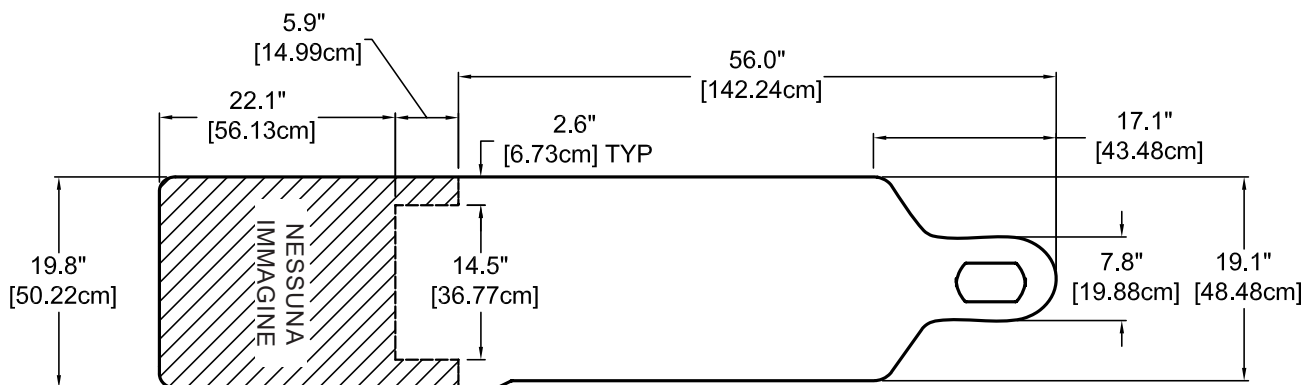


### VISUALIZZAZIONE CAUDALE 30° PER VERTICALE:

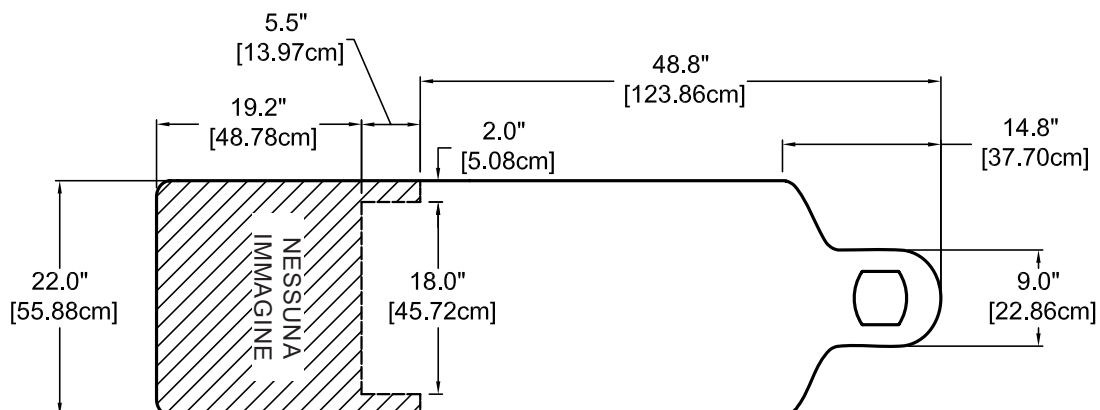


## RIFERIMENTO

AREA UTILIZZABILE PER L'IMAGING - CFPM100  
SOLO TOP RETTANGOLARI


### CENTRATO PER UNA VISUALIZZAZIONE A-P:

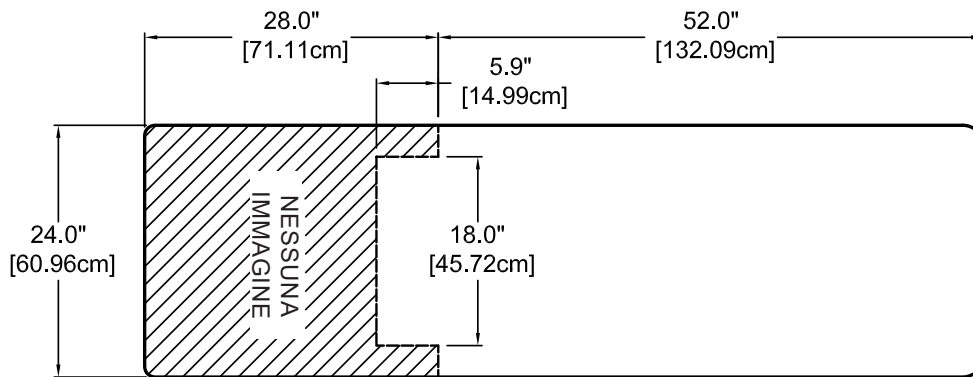

### VISUALIZZAZIONE OBLIQUA A 30° PER VERTICALE:

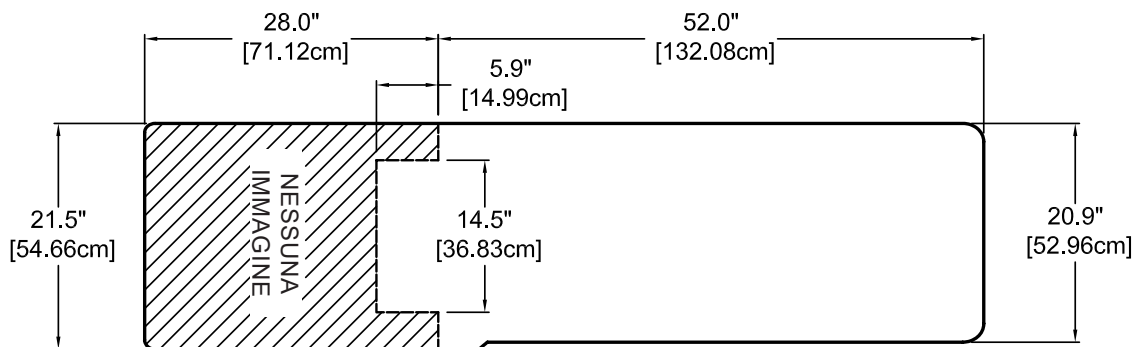


### VISUALIZZAZIONE CAUDALE 30° PER VERTICALE:

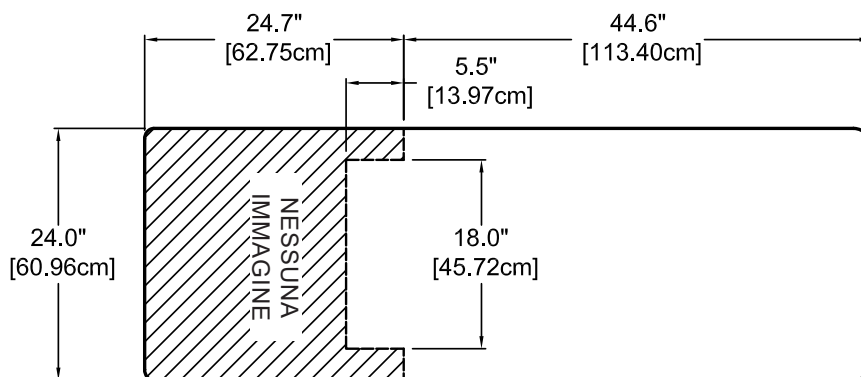


## RIFERIMENTO

AREA UTILIZZABILE PER L'IMAGING - CFPM200 ATTRAVERSO  
CFPM401 SOLO TOP CON POGGIATESTA INTEGRATI


### CENTRATO PER UNA VISUALIZZAZIONE A-P:

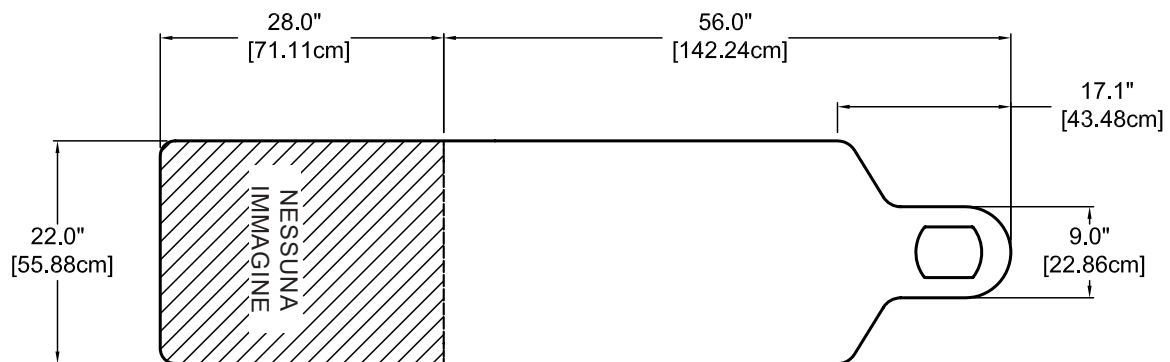

### VISUALIZZAZIONE OBLIQUA A 30° PER VERTICALE:

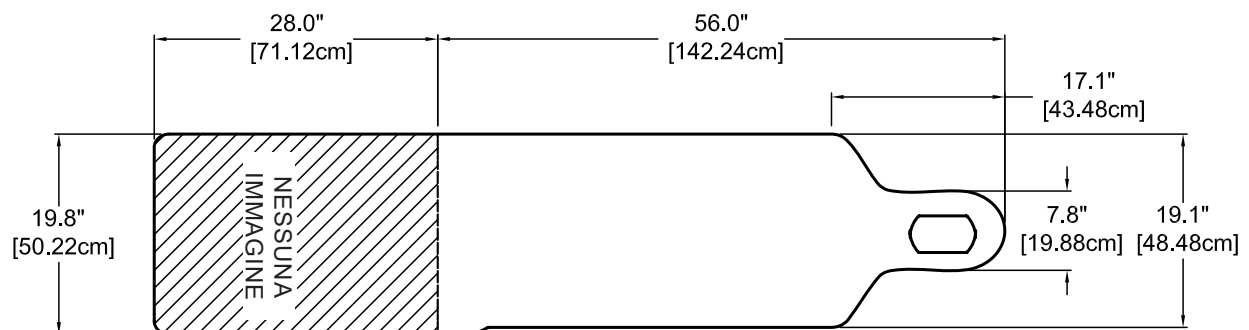


### VISUALIZZAZIONE CAUDALE 30° PER VERTICALE:

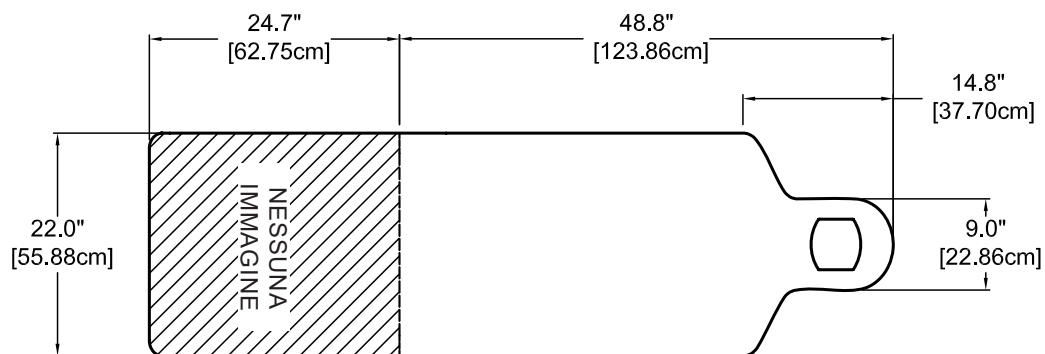


## RIFERIMENTO

AREA UTILIZZABILE PER L'IMAGING - CFPM200 ATTRAVERSO  
CFPM401 SOLO TOP RETTANGOLARI


### CENTRATO PER UNA VISUALIZZAZIONE A-P:

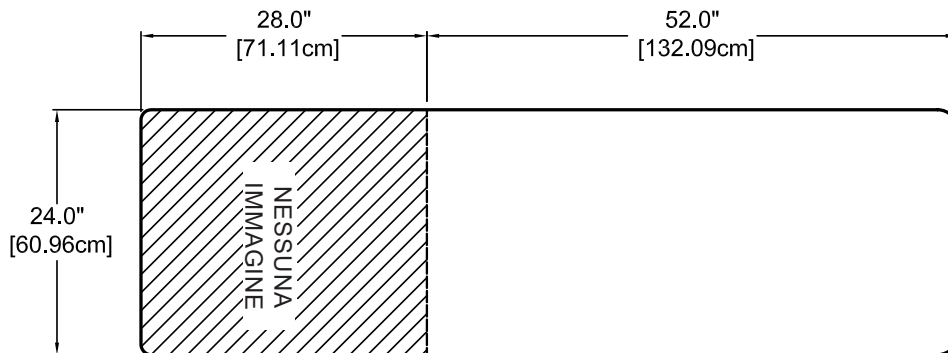

### VISUALIZZAZIONE OBLIQUA A 30° PER VERTICALE:

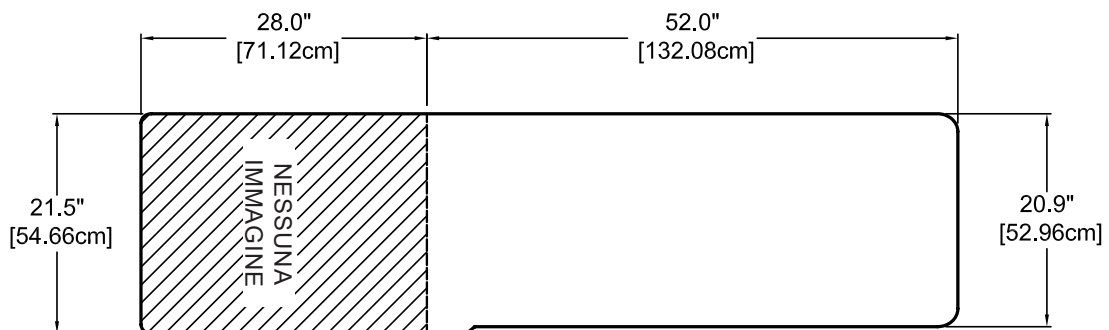


### VISUALIZZAZIONE CAUDALE 30° PER VERTICALE:

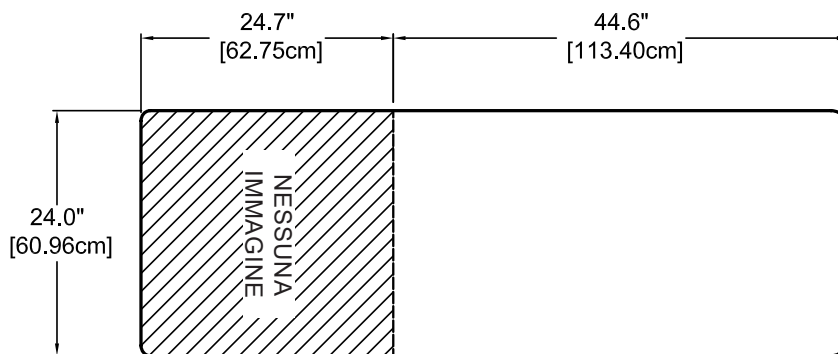


AREA UTILIZZABILE PER L'IMAGING - CFUR301 E CFUR 401


CENTRATO PER UNA VISUALIZZAZIONE A-P:

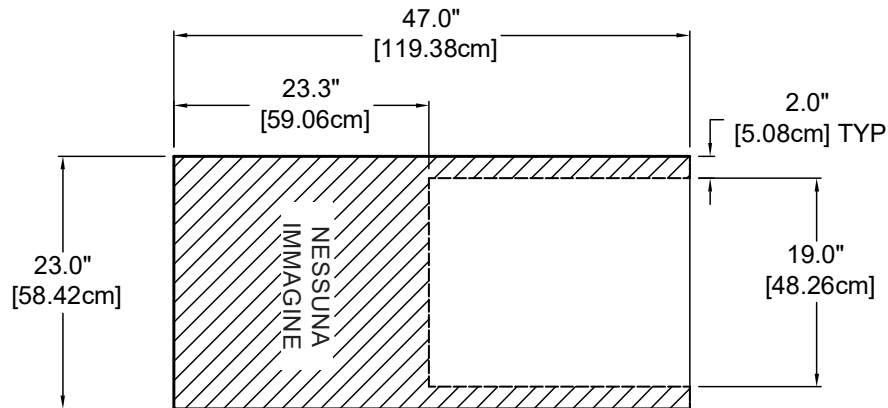

VISUALIZZAZIONE OBLIQUA A 30° PER VERTICALE:

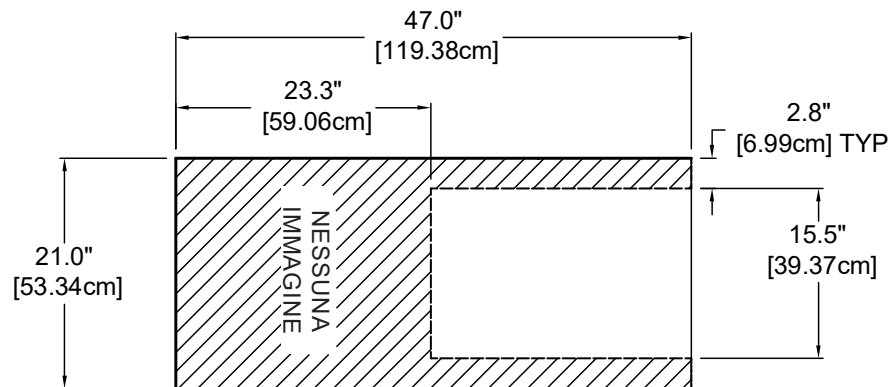


VISUALIZZAZIONE CAUDALE 30° PER VERTICALE:

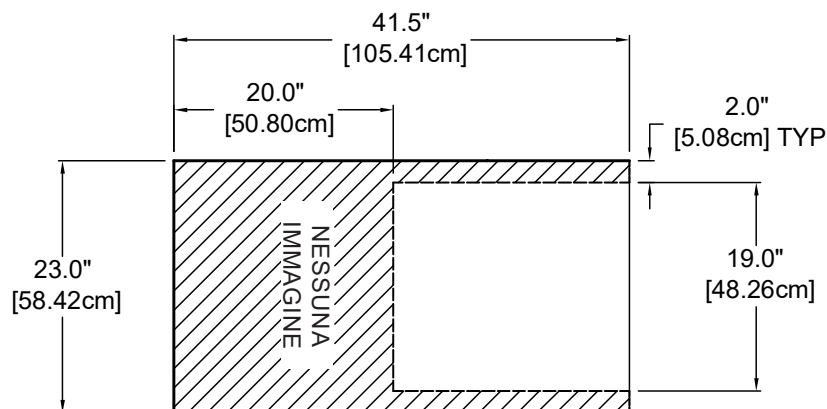


AREA UTILIZZABILE PER L'IMAGING - CFLU401


CENTRATO PER UNA VISUALIZZAZIONE A-P:

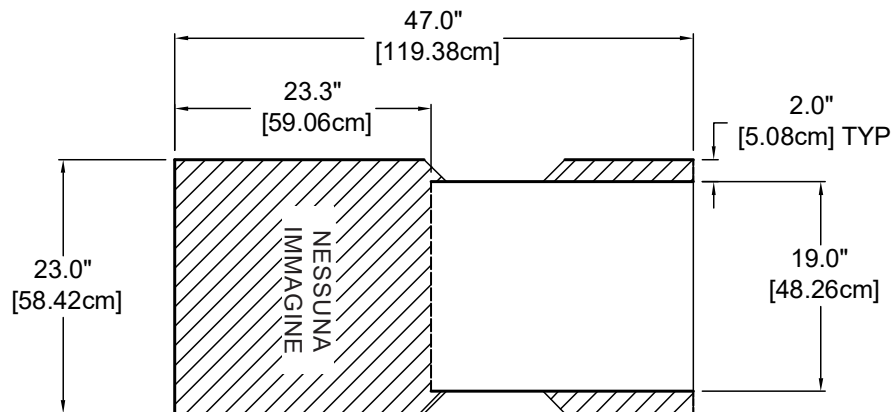

VISUALIZZAZIONE OBLIQUA A 30° PER VERTICALE:

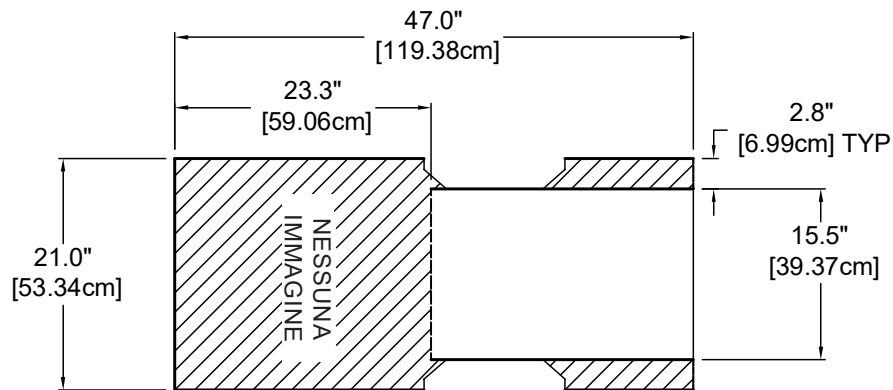

VISUALIZZAZIONE CAUDALE 30° PER VERTICALE:

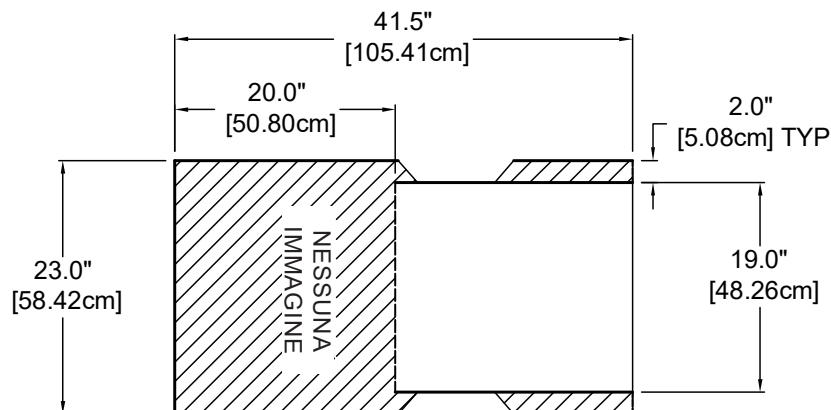

### DISINFETTANTI / AGENTI PER LA PULIZIA RACCOMANDATI



**PERICOLO** Per ridurre il rischio di scossa elettrica:  
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di pulirlo.

Fare riferimento alla lista di detergenti/disinfettanti raccomandati (MMINML0008-EN) in dotazione con il lettino. Queste informazioni sono disponibili anche sul sito web [www.oakworksmmed.com](http://www.oakworksmmed.com) nelle informazioni sul prodotto.

Tutti i detergenti e i disinfettanti hanno la capacità di rovinare in un certo modo il rivestimento. Tuttavia, seguendo la lista dei detergenti e disinfettanti raccomandati nonché i processi per la pulizia, si potrà garantire la migliore cura possibile al lettino e promuovere una lunga vita del prodotto.

Oakworks raccomanda un panno confezionato per detergenti/disinfettanti in modo da assicurare una migliore distribuzione del disinfettante per il tempo necessario, senza lasciare residui in eccesso e/o sovraesporre i componenti, riducendo così al minimo il potenziale di danni ai materiali. Leggere e seguire le istruzioni del produttore dei disinfettanti per la pulizia e la disinfezione.

Oakworks NON raccomanda l'uso di detergenti/disinfettanti contenenti perossido di idrogeno, acido acetico o fenolici. Queste sostanze chimiche possono provocare danni all'aspetto e/o all'integrità dei materiali dei vari componenti. Inoltre, anche se la lista dei detergenti/disinfettanti raccomandati include prodotti contenenti composti di ammonio quaternario ("quat"), non tutti i prodotti contenenti quat sono approvati per l'uso. Alcuni contengono detergenti e/o tensioattivi aggiuntivi che possono danneggiare alcuni materiali.

**L'uso di detergenti o disinfettanti non approvati potrebbe danneggiare il rivestimento e altri materiali presenti sul lettino e ne annullerà la garanzia.**

### PROCESSO DI PULIZIA

Seguire le istruzioni per l'uso dei produttori di detergente/disinfettante. Notare che la pulizia e la disinfezione di un lettino Oakworks rappresentano una procedura in due parti. Per prima cosa, bisogna pulire tutto lo sporco visibile, poi si può procedere con la disinfezione. Oakworks raccomanda di posizionare il lettino in orizzontale durante il processo di pulizia. Seguire questa procedura per i migliori risultati:

1. Utilizzando detergente approvato o acqua con sapone liquido delicato, eliminare tutto lo sporco visibile dal lettino, procedendo dalla parte alta verso quella bassa del lettino. Si raccomanda di pulire il rivestimento almeno una volta a settimana per evitare l'accumulo di disinfettante.
2. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno o un asciugamano pulito.
3. Utilizzando un disinfettante approvato, disinfettare bene tutte le superfici della parte alta del lettino e tutte le aree ad elevato tasso di contatto come maniglie, ricevitore, ecc. assicurando che restino bagnate per il tempo di contatto raccomandato dal produttore del disinfettante. Non lasciare che il disinfettante ristagni sul rivestimento oltre il tempo di contatto raccomandato.
4. Pulire tutto il liquido in eccesso con un panno o un asciugamano e acqua pulita.
5. Asciugare tutte le superfici con un panno o un asciugamano pulito.

Evitare di utilizzare strumenti per la scrittura o altri strumenti simili sul rivestimento poiché potrebbero crearsi macchie permanenti. In questo caso, non pulire con detergenti a base di alcool. Al contrario, tamponare la macchia con un asciugamano di carta/un panno pulito. Utilizzare un detergente o disinfettante consigliato per rimuovere la macchia. In seguito sciacquare con acqua pulita.

### ISPEZIONI

#### ISPEZIONI REGOLARI RACCOMANDATE (mensili o secondo standard locale)

- Verificare eventuali danni all'alimentazione e a tutti i cavi di comando manuale o a pedale.
- Effettuare una ispezione visiva per danni evidenti che potrebbero provocare problemi durante il funzionamento.

#### ISPEZIONI PERIODICHE RACCOMANDATE (annuali o secondo standard locale)

- Verificare eventuali danni ad alimentazione, cavi di comando manuale e a pedale e tutti i cavi visibili.
- Effettuare una ispezione visiva per danni evidenti che potrebbero provocare problemi durante il funzionamento.
- Controllare tutte le funzioni meccaniche utilizzando il comando manuale. Ripetere utilizzando il comando a pedale. Verificare che non vi siano rumori anomali.
- Controllare che tutti i fissaggi siano presenti e montati in modo sicuro.
- Controllare il collegamento a terra del lettino.
- Eliminare formazioni insolite di sporco su lettino e/o parti dello stesso che normalmente non vengono pulite in modo regolare.
- Verificare la presenza di lesioni o fessure nel rivestimento.

### GARANZIA

Visualizza i dettagli completi della garanzia su [www.oakworksmed.com](http://www.oakworksmed.com) nella scheda "Warranty and Return Policy."

# INFORMAZIONI IDENTIFICATORE UNICO DEL DISPOSITIVO (UNIQUE DEVICE IDENTIFICATION, UDI)

## INFORMAZIONI IDENTIFICATORE UNIVOCO DEL DISPOSITIVO (UNIQUE DEVICE IDENTIFICATION, UDI)




L'etichetta UDI si trova sotto la finestra trasparente dell'etichetta del prodotto.

### Imaging Table

**Lettino CFPM400**

**Produttore:**  
Oakworks, Inc.  
923 East Wellspring Road  
New Freedom, PA, USA 17349  
+1 717-235-6807  
www.oakworks.com

**GTIN** 00817463021325  
**Data prod.:** 2016-10-26  
**SN** FL4636744  
**MD** QTY: 1 CIASC.



(01)00817463021325(11)20161026(21)FL4636744

120V~ 60Hz  
8.2 Amps Max

**ETL** CONFORMS TO:  
ANSI/AAMI  
STD E566001-1  
IEC STD 60601-1-6  
Certified to  
CAN/CSA STD  
C22.2 No. 60801-1

230V~ 50Hz  
4.1 Amps Max

**EC REP** **CE**

EMERGO EUROPE  
Pittressegracht 201, 2414 AP,  
The Hague, The Netherlands

**Class 1 Equipment**  
**Duty Cycle:**  
**MAX 2 minutes ON**  
**18 minutes OFF**

Part No. CN70537-1 - Rev.1

This product complies with DHHS radiation performance standards 21 CFR Subchapter J, in the effect at the time of manufacturer.


**OAKWORKS, INC.**  
923 East Wellspring Rd.  
New Freedom, PA 17349 USA  
Phone: 717-235-6807  
www.oakworks.com

made in the USA  
with US & imported parts

**Lettino CFPM400**

**Produttore:**  
Oakworks, Inc.  
923 East Wellspring Road  
New Freedom, PA, USA 17349  
+1 717-235-6807  
www.oakworks.com

**GTIN** 00817463021325  
**Data prod.:** 2016-10-26  
**SN** FL4636744  
**MD** QTY: 1 CIASC.



(01)00817463021325(11)20161026(21)FL4636744

GTIN      Data fabbricazione      Numero di serie

Nome modello


Informazioni identificatore univoco del dispositivo:

- GTIN – numero unico di 14 cifre per ciascuna variazione di modello
- Data di fabbricazione – Paese di fabbricazione e data in cui il dispositivo va in produzione in formato AAAA-MM-GG
- SN – Numero di serie
- MD - Simbolo del dispositivo medico
- QTY – Quantità del prodotto

## SPECIFICHE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO			
	NORD AMERICA	EUROPA	
Peso	359-452 lb	163-205 kg	
Peso con imballaggio	452-544 lb	205-247 kg	
Capacità di sollevamento	500 libbre (750 lb bariatrico)	227 kg (340 kg) bariatrico)	
Materiali di costruzione	Questo prodotto non contiene latex.		
Equivalenza filtrazione alluminio e spessore del top del lettino in fibra di carbonio	EQUIVALENZA ALLUMINIO		SPESSORE
	Top non bariatrici	100 kVp, HVL di 3,6 mm = 1,10 (1,35 max)	1,65" (4,2 cm)
	Top bariatrici	100 kVp, HVL di 3,6 mm = 1,50 (1,79 max.)	2,18" (5,5 cm)
	Tutte le estensioni	100 kVp, HVL di 3,6 mm = 1,66 (2,00 max.)	0,5" (1,3 cm)
	1" (2,5 cm). Cuscinetto lettino	100 kVp, HVL di 3,6 mm = 0,88 (1,07 max.)	1" (2,5 cm)
	2" (5 cm). Cuscinetto lettino	100 kVp, HVL di 3,6 mm = 0,88 (1,07 max.)	5 cm (2")
Questo prodotto è conforme agli standard delle performance delle radiazioni dell'United States Department of Health and Human Services, 21 CFR sottocapitolo J, in vigore al momento della fabbricazione dei lettini radiografici.			

CONDIZIONI AMBIENTALI			
Condizioni	Temperatura	Umidità	Pressione atmosferica
Utilizzo normale	Da 10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F)	Dal 20% al 60% di umidità relativa	Da 98 a 105 kPa
Stoccaggio e trasporto	Da -29 °C (-20 °F) a 57 °C (135 °F)	Dal 20% al 95% di umidità relativa	Da 98 a 105 kPa

SPECIFICHE ELETTRICHE				
Destinato a:	Solo lettini CFPM100		Tutti gli altri tavoli	
	NORD AMERICA	EUROPA	NORD AMERICA	EUROPA
Input Service (tutti lettini elettrici)	120 VCA/15 amp/ 60 Hz	230 VCA/ 10 amp/50/60 Hz	120 VCA/15 amp/ 60 Hz	220 VCA/ 10 amp/50/60 Hz
Potenza assorbita	5,8 amp	3,0 amp	8,2 amp	4,5 amp
Consumo massimo corrente momentanea	9,0 amp	4,5 amp	12,3 amp	6,7 amp
Uscita tensione verso gli attuatori	120 VCC	220 VCC	24V top, 120V colonna	24V top, 220V Colonna
Protezione da shock elettrico	Apparecchiatura di classe 1			
Parte applicata top del lettino	 Parte applicata di tipo B			
Valore nominale protezione ingresso	Tavolo (IPX0), Controllo manuale (IPX6), Controllo a pedale (IPX8)			
Modalità di funzionamento	Funzionamento ad intermittenza: MAX 2 minuti acceso / 18 minuti spento			

## SPECIFICHE

### Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche Tutti gli apparecchi e i sistemi (tranne CFPMFXH)

Il lettino è destinato ad essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del lettino deve assicurare che sia utilizzato in tale ambiente.

Test emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico – guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il lettino utilizza energia RF solo per funzione interna. Pertanto le emissioni RF sono molto basse e non hanno probabilità di provocare alcuna interferenza nelle apparecchiature elettroniche circostanti.
Emissioni RF CISPR 11	Classe A	Il lettino è adatto ad essere utilizzato in tutte le strutture diverse dalle domestiche e quelle direttamente collegate alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissioni flicker IEC 61000-3-3	Conforme	

### Distanze raccomandate tra apparecchiature RF portatili e mobili di comunicazione e i lettini per imaging e gestione del dolore Oakworks per apparecchi e sistemi che **NON** siano salvavita

Il lettino è destinato ad essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi radiati da RF sono controllati. Il cliente o l'utente del lettino possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra apparecchiature di comunicazione a RF portatili e mobili (trasmettitori) e il lettino come consigliato di seguito, secondo la potenza di uscita massima dell'apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita massima nominale del trasmettitore  W	Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore (m)		
	Da 150 kHz a 80 MHz  $d = 1,2 \sqrt{P}$	Da 80 MHz a 800 MHz  $d = 1,2 \sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,5 GHz  $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Per trasmettitori con potenza nominale di uscita massima non elencati sopra, la distanza di separazione consigliata  $d$  in metri (m) può essere valutata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore laddove  $P$  è il valore nominale dell'alimentazione di uscita massima del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.



NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più alto.

NOTA 2 Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è interessata da assorbimento e riflessioni da parte di strutture, oggetti e persone.

## SPECIFICHE


### ZONA DI ESPOSIZIONE

Le zone di esposizione e la radiazione diffusa nella zona delle apparecchiature di imaging sono mostrate di seguito, secondo la clausola 13.4 e 13.6 in IEC 60601-1-3:2013.

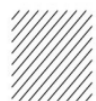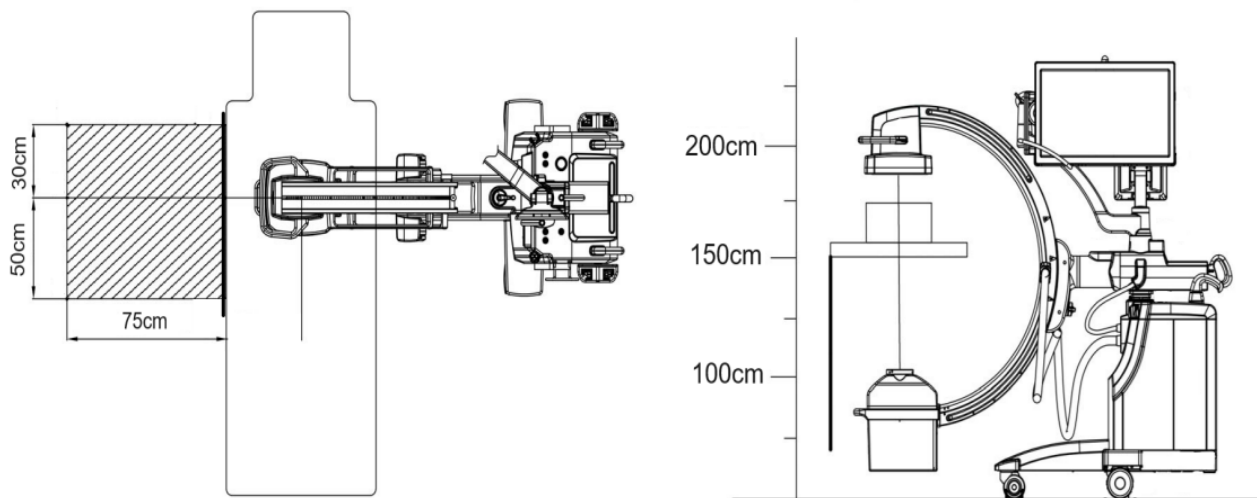


Significant Zones of Occupancy

Protective Device

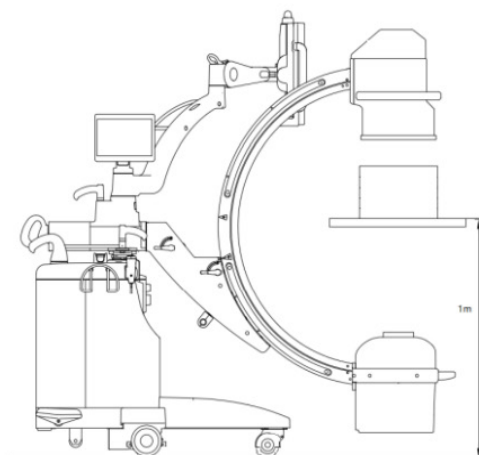

Vertical configuration

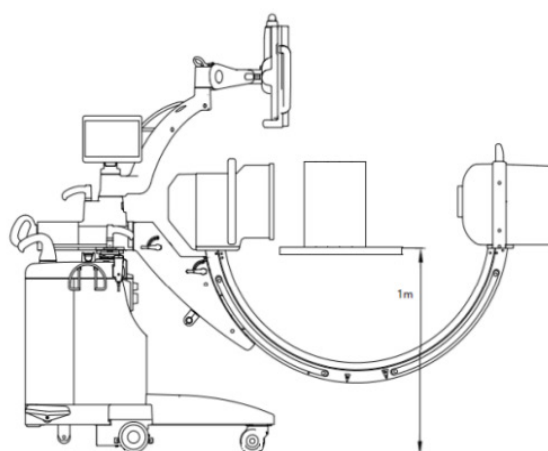


Horizontal configuration


## ZONA DI ESPOSIZIONE

Map Test Kerma ISO secondo la clausola 203.13.4 in EN 60601-2-43:2010. La misurazione viene eseguita su 2 piani ad un'altezza tipica di 1,5m da terra quando il sistema è in modalità normale 110kV, 4mA. La superficie del tavolo operatorio è a 1,5m dal pavimento.


Mappe Kerma ISO tipiche

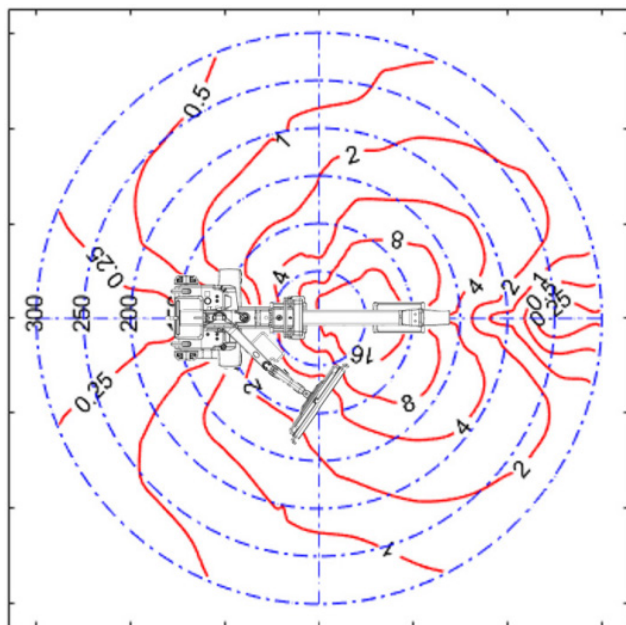


Configurazione orizzontale, 1,5m

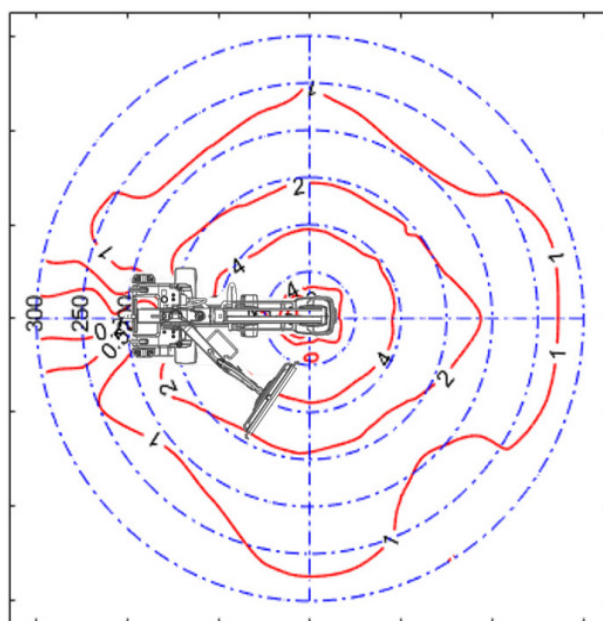

Configurazione verticale, 1,5m

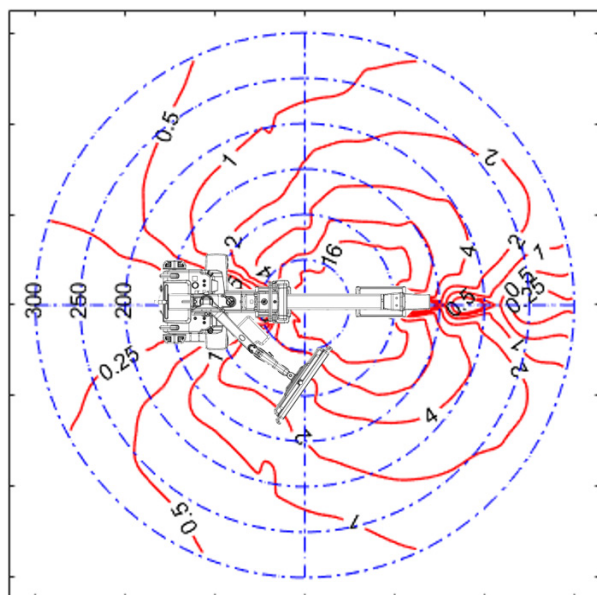

Configurazione orizzontale, 1,0m

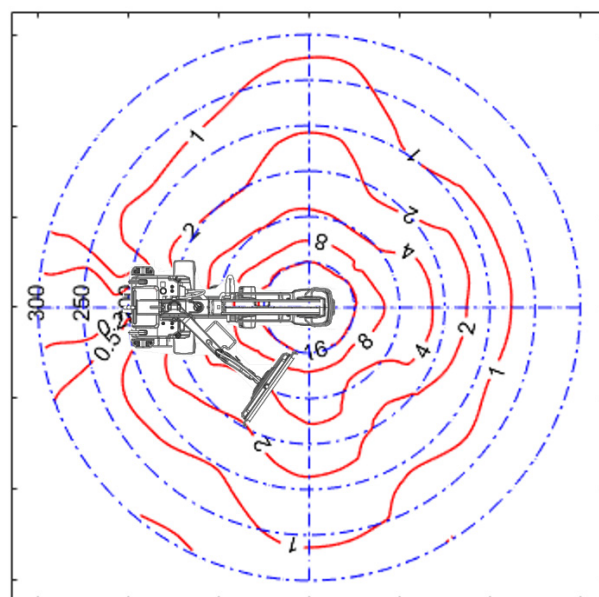


Configurazione verticale, 1,0m

## SPECIFICHE

### ZONA DI ESPOSIZIONE

Portata aria  
Kerma  
(in  $\mu\text{Gy/hr}$ )

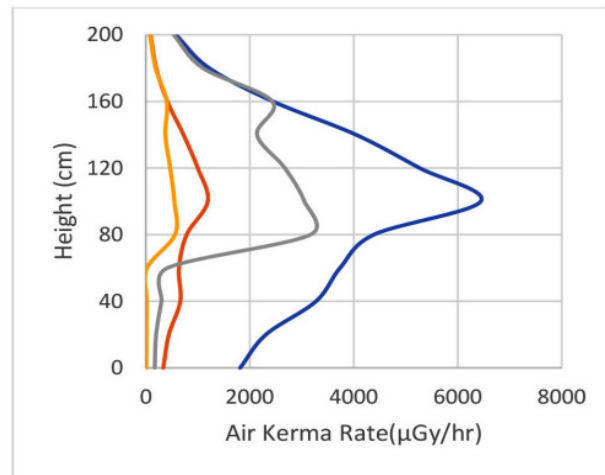

- 110kV/4mA Without Protective Device
- 70kV/3mA Without Protective Device
- 110kV/4mA With Protective Device
- 70kV/3mA With Protective Device


PER ESAMI GASTROINTESTINALI I LIMITI SEGUENTI DI KERMA PER L'ARIA IN UN'ORA NON DEVONO SUPERARE QUELLI NELLA TABELLA CHE SEGUE.

PORTATA ARIA KERMA (ESAMI GASTROINTESTINALI)		
Orientamento del SUPPORTO DEL PAZIENTE	Regione dell'altezza correlata al PUNTO DI RIFERIMENTO del RILEVATORE DI RADIAZIONI (al di sopra del pavimento) nella ZONA DI ESPOSIZIONE cm	PORTATA ARIA KERMA massima permessa in un'ora mGy
Orizzontale o verticale	Da 0 a 40	1,5
Orizzontale	Da 40 a 200	0,15
Verticale	Da 40 a 170	0,15

## SPECIFICHE

### ZONA DI ESPOSIZIONE

Le zone di esposizione e la radiazione diffusa nella zona delle apparecchiature di imaging sono mostrate di seguito, secondo la clausola 13.4 e 13.6 in IEC 60601-1-3:2013.

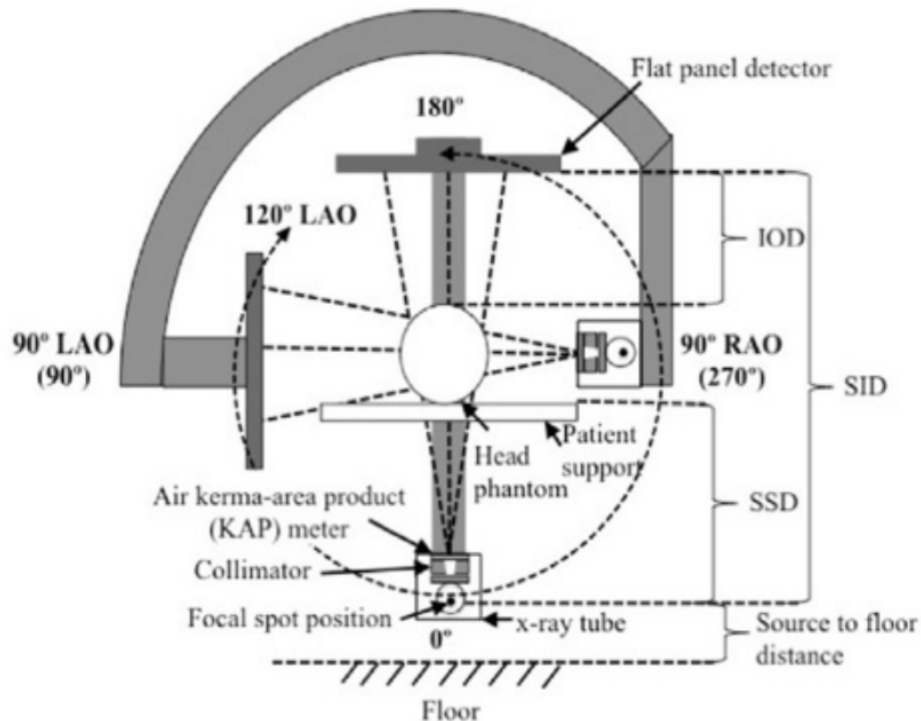

Posizioni delle macchie focali e del fascio

### SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Lo smaltimento dei lettini per imaging e gestione del dolore Oakworks deve essere conforme alle norme e ai requisiti applicabili di agenzia locale per la tutela dell'ambiente, agenzia sanitaria statale, centri per il controllo delle malattie (CDC, Centers for Disease Control), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), U.S. Food and Drug Administration (FDA) nonché di tutte le altre autorità locali applicabili a questo prodotto.

# MANUALE D'USO

## OAKWORKS®

# Lettini per imaging e gestione del dolore

### INFORMAZIONI DI CONTATTO:



#### OAKWORKS® Inc.

923 East Wellspring Road  
New Freedom, PA USA 17349

Phone: 717.235.6807

FAX: 717.235.6798

www.oakworksmed.com

#### CoYoMe B.V.

Edisonstraat 4

3261 LD Oud-Beijerland, The Netherlands


www.coyome.eu

Enrico Cohen

Enrico@coyome.nl

info@coyome.nl

Phone: +31 613.886.424

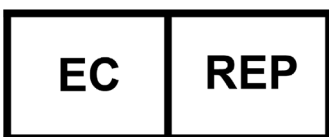

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



**Intertek**

3034177

CONFORME A:  
ANSI/AAMI STD ES60601-1  
IEC STD 60601-1 TERZA EDIZIONE  
IEC STD 60601-1-2 IL QUARTO EDIZIONE  
IEC STD 60601-1-6 3A EDIZIONE  
IEC STD 60601-2-32  
CERTIFICATO CAN/CSA STD C22.2 N. 60601-1  
CERTIFICATO E RAPPORTO TEST CB

Norme e regolamenti FCC, Titolo 47, Parte 15, Capo B, Classe A. Termosifoni imprevisi.

NOTA: Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze pericolose quando il dispositivo è utilizzato in un ambiente commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può diffondere frequenze radio e, se non è installato né utilizzato ai sensi del manuale di istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questo dispositivo in un'area residenziale potrebbe provocare interferenze dannose per cui l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese.

Avviso: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Oakworks® Inc. e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Istruzioni originali

Codice del manuale MMMNST0008-IT / Med-RA-PM-75

Revisione: 20

Data di revisione: 02/03/2026

Italiano, stampato negli Stati Uniti

